

GBT PER LA CRESCITA DEL TUO STUDIO



#IAMGBT

IL COMPASS **GBT** E IL

08 RICHIAMO

PAZIENTE SANO = PAZIENTE FELICE

- Programmare la frequenza dei richiami secondo la valutazione del rischio
- Chiedere al paziente se è rimasto soddisfatto del trattamento

07 CONTROLLO

FAR SORRIDERE IL PAZIENTE

- Eseguire un controllo finale per evidenziare il biofilm residuo
- Assicurarsi che il tartaro sia stato completamente rimosso
- Diagnosticare con accuratezza eventuali carie
 - Proteggere con fluoro
 - Niente più lucidatura

06 PIEZON® PS


RIMUOVERE IL TARTARO RESIDUO

- Utilizzare lo strumento PIEZON® PS EMS minimamente invasivo a livello sopragengivale e sottogengivale fino a 10 mm
- Pulire le tasche maggiori di 10 mm con mini curette
- Utilizzare lo strumento PIEZON® PI MAX EMS attorno a impianti fino a 3 mm a livello sottogengivale e sui restauri

05 PERIOFLOW®

RIMUOVERE IL BIOFILM IN TASCHE DA 4 A 9 MM

- Utilizzare la polvere AIRFLOW® PLUS sui denti in tasche profonde e forcazioni radicolari e sugli impianti
- Utilizzare il nuovo puntale PERIOFLOW® più sottile con misuratore di profondità

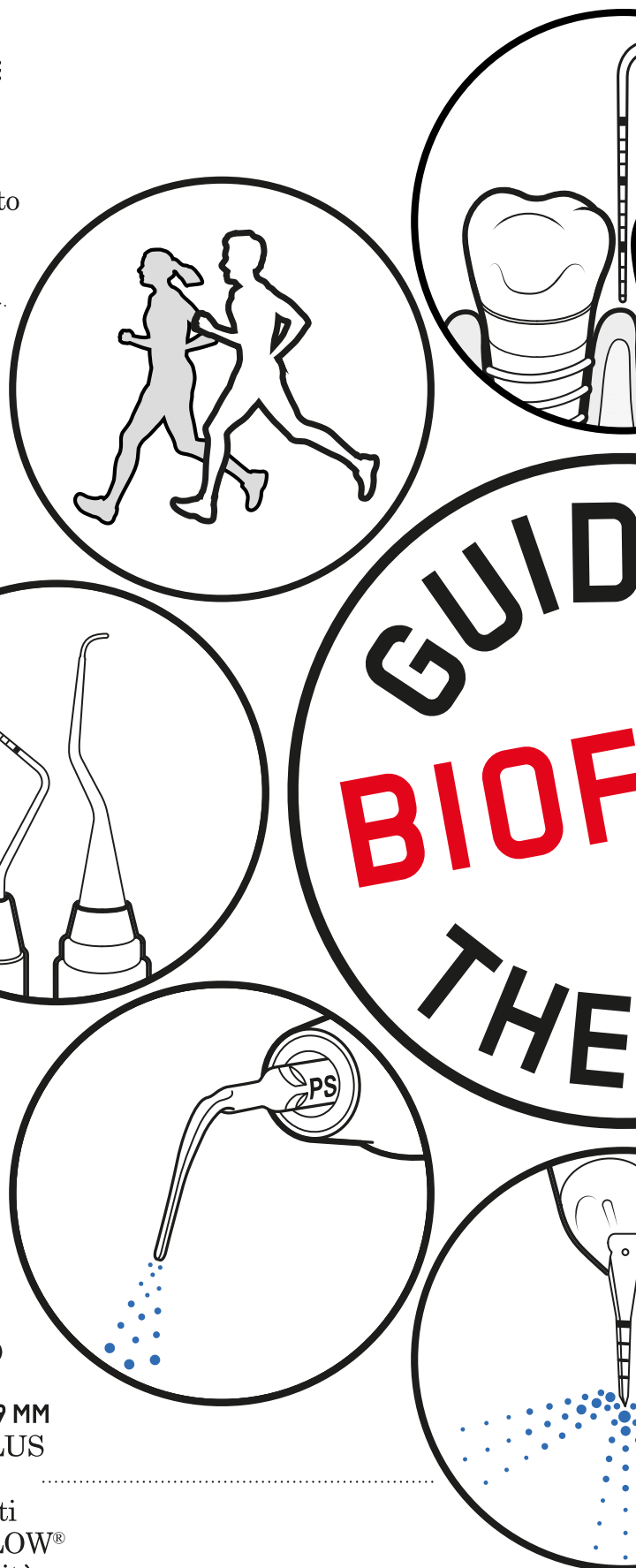

PROTOCOLLO IN 8 STEP



01 DIAGNOSI E CONTROLLO INFEZIONI

VALUTARE OGNI CASO ED ESEGUIRE MISURE DI IGIENE

- Iniziare risciacquando con il collutorio BacterX® Pro
- Valutare denti, gengive e tessuti parodontali
- Valutare impianti e tessuti peri-implantari

02 LOCALIZZAZIONE

RENDERE VISIBILE IL BIOFILM

- Mostrare ai pazienti il biofilm localizzato con il rilevatore di placca Biofilm Discloser EMS
- La rimozione del biofilm viene guidata dal colore
- Una volta rimosso il biofilm, è più facile individuare il tartaro

03 MOTIVAZIONE


AUMENTARE LA CONSAPEVOLEZZA ED EDUCARE

- Insistere sulla prevenzione
- Dare ai pazienti istruzioni sull'igiene orale domiciliare
- EMS raccomanda di utilizzare scovolino o filo interdentale, spazzolino elettrico o manuale e dentifricio AIRFLOW® per l'igiene orale domiciliare quotidiana

04 AIRFLOW® MAX

RIMUOVERE BIOFILM, MACCHIE E TARTARO DI RECENTE FORMAZIONE

- Utilizzare AIRFLOW® MAX per denti naturali, restauri e impianti
- Rimuovere il biofilm a livello sopragengivale e sottogengivale fino a 4 mm mediante polvere AIRFLOW® PLUS 14 µm
- Rimuovere il biofilm anche da gengive, lingua e palato

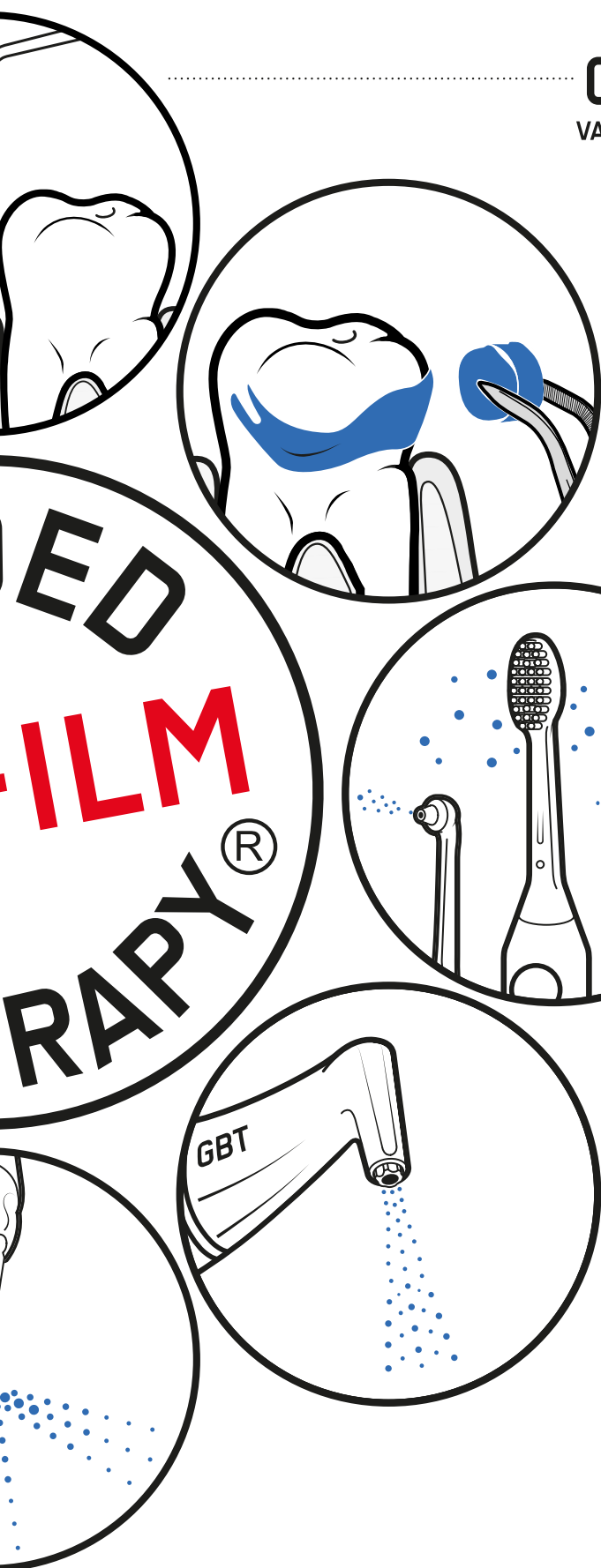



”

**IL TEAM SI DIVERTE,
I PAZIENTI SI DIVERTONO.
IO CONSIGLIO LA GBT.**

Dr. François Veuve
Studio dentistico des Halles



DR. VEUVE, NEUCHÂTEL, SVIZZERA

GLI 8 STEP ILLUSTRATI



STEP 1 - DIAGNOSI E CONTROLLO INFEZIONI

Esamina attentamente la cavità orale per valutare lo stato di salute del paziente prima di procedere con il trattamento. Questo passaggio fondamentale ti consente di prepararti al meglio per l'intervento imminente, assicurandoti di fornire cure personalizzate ed efficaci.



STEP 2 LOCALIZZAZIONE

Il rilevatore di placca rende il biofilm visibile, consentendo di trattare in modo mirato ciò che è evidente. Questo strumento guida il clinico nel trattamento, ottimizzando l'intervento e migliorando la consapevolezza del paziente riguardo alle cure domiciliari per una salute orale ottimale.




STEP 3 MOTIVAZIONE

Per mantenere una salute orale a lungo termine, è essenziale combinare una regolare igiene orale professionale con un'accurata cura quotidiana. È fondamentale che il paziente comprenda l'importanza della cura domiciliare e sia consapevole delle migliori tecniche adatte alle proprie esigenze personali.



STEP 4 AIRFLOW® MAX

Il biofilm visibile può essere efficacemente rimosso grazie al getto laminare di acqua e polvere. La polvere PLUS può essere utilizzata in tutti i casi al 100%, eliminando il biofilm sia sopra che sotto la linea gengivale, garantendo al paziente un trattamento confortevole e minimamente invasivo.

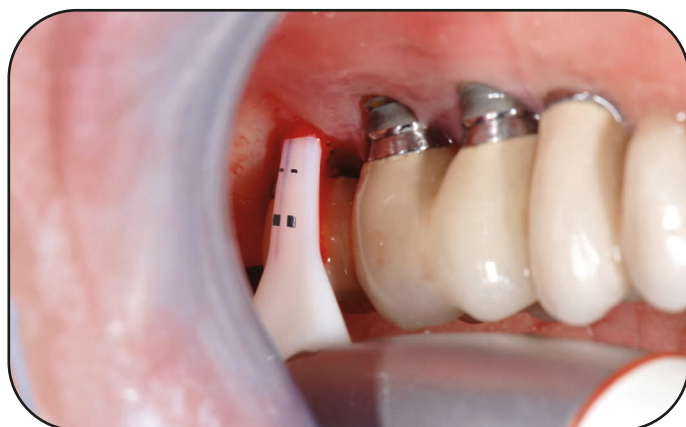

STEP 5 PERIOFLOW®

È essenziale rimuovere in modo sicuro il biofilm subgingivale. Il puntalino PERIOFLOW®, sottile e flessibile, permette un miglior accesso. Il trattamento con PERIOFLOW® è indicato sia come terapia iniziale che di follow-up (SPT) per la parodontite, nonché per il trattamento iniziale e di follow-up di mucositi e peri-implantiti.



STEP 6 PIEZON® PS

Il tartaro residuo viene rimosso senza provocare dolore e senza danneggiare lo smalto, grazie alla regolazione dinamica della potenza e al modulo NO PAIN.



STEP 7 CONTROLLO

Eventuali carie o altri problemi precedentemente nascosti sono ora visibili, consentendo di indirizzare il paziente ad un dentista o a uno specialista per un intervento tempestivo.



STEP 8 RICHIAMO

Per mantenere a lungo la salute orale è essenziale sottoporsi regolarmente a trattamenti di profilassi. Il prossimo appuntamento di controllo viene fissato in base alle necessità del paziente, garantendo un piano di trattamento personalizzato. Questo controllo successivo serve anche a valutare la soddisfazione del paziente riguardo al trattamento ricevuto.



”

IL PROGRAMMA DI
CERTIFICAZIONE GBT MIGLIORA
LA VISIBILITÀ DELLA MIA PRATICA
E RAFFORZA L'IMPORTANZA
DEL NOSTRO IMPEGNO.
VOLEVO MANTENERMI SEMPRE
AGGIORNATO SIA DAL PUNTO DI
VISTA CLINICO CHE AZIENDALE.

Dr. Gianandrea Poggi, Odontoiatra



LEGGI L'ARTICOLO
COMPLETO

”

**DOPO UN ANNO, ABBIAMO
TRIPLICATO IL NUMERO DI
APPUNTAMENTI!**

Dr. Gianandrea Poggi, Odontoiatra



I RICAVI DI UNO STUDIO DENTISTICO

**IL 70% DEL FATTURATO DIRETTO
DERIVA DAI SERVIZI OFFERTI DAL
DENTISTA**



**IL 64% DI TUTTI I TRATTAMENTI
ODONTOIATRICI ESEGUITI DAI
DENTISTI E SPECIALISTI SONO STATI
RACCOMANDATI IN SEGUITO AL
TRATTAMENTO GBT.**


**IL 30% DEL FATTURATO DIRETTO
È GENERATO GRAZIE ALL'ATTIVITÀ
DELL'IGIENISTA.**

Basato su uno studio condotto su 24 studi odontoiatrici in Svizzera

L'EFFETTO DEL PROTOCOLLO GBT




L'ESEMPIO DI UNA CATENA SVIZZERA DI STUDI DENTISTICI

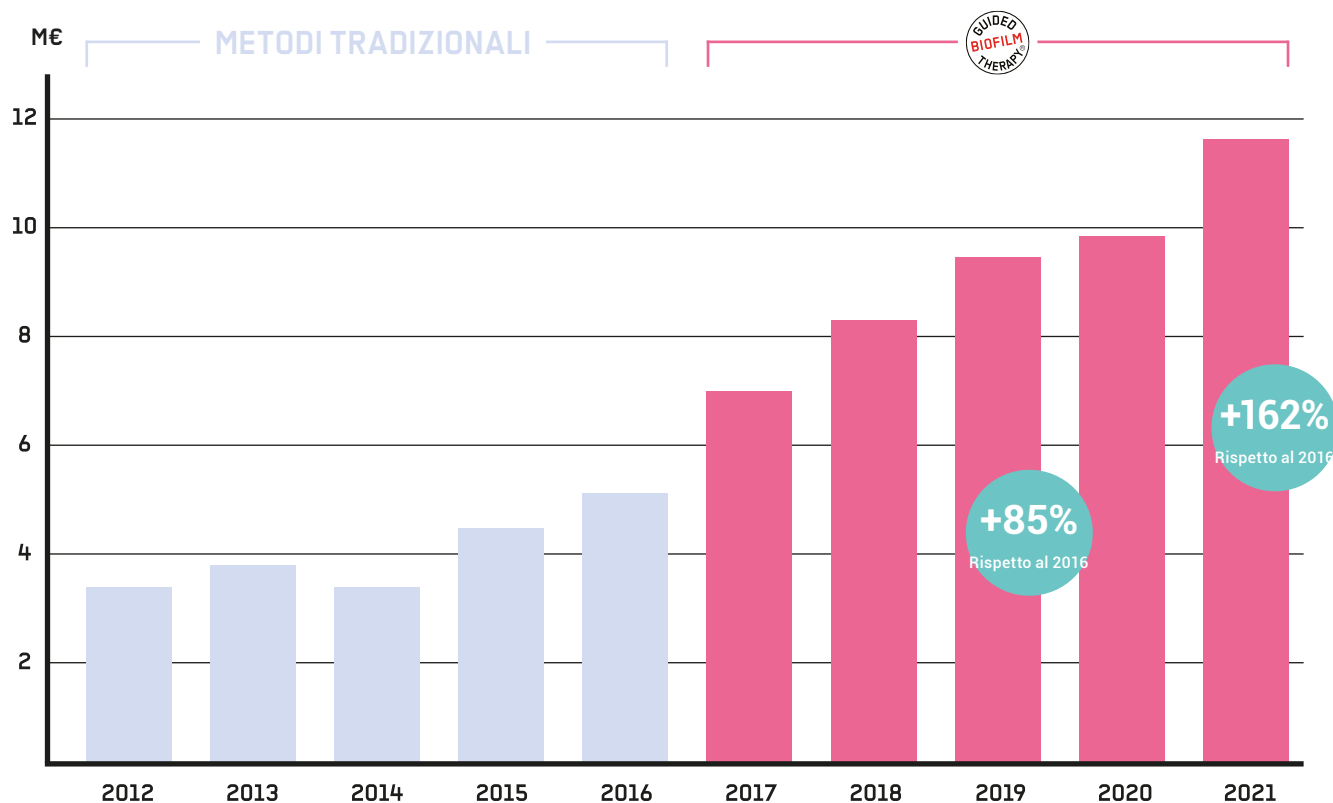

Ecco un esempio di 24 cliniche odontoiatriche che hanno implementato il protocollo GBT nel 2017.
Queste cliniche hanno quasi raddoppiato il fatturato a fine 2019 (85%).


RICAVO MEDIO PER ORA

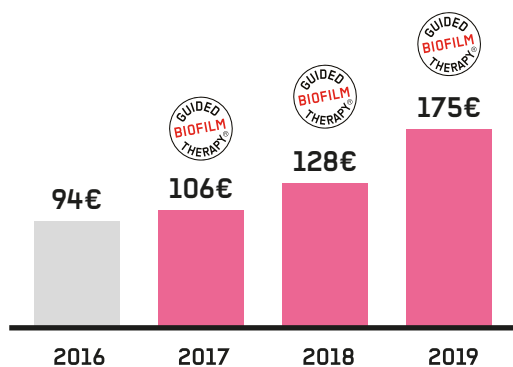

Il ricavo per ora è aumentato dell'86% durante questo periodo

NUMERO MEDIO DI CONSULENZE ALL'ANNO

Per igienista dentale

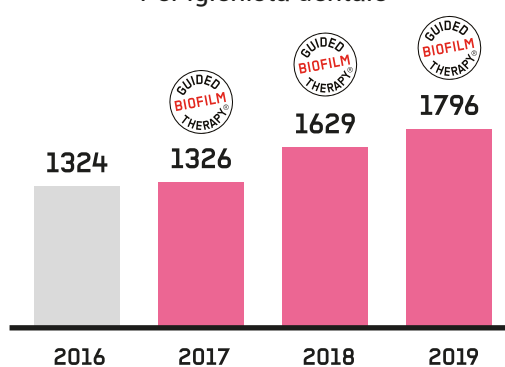

Vediamo i benefici di un modello di cura continua, con un aumento del 36% nel numero medio di consulenze.

Nessun aumento di prezzo durante questo periodo

”

**MI PIACE OFFRIRE AI MIEI
PAZIENTI UN'ESPERIENZA DA
SPA E ALLO STESSO TEMPO UN
TRATTAMENTO DI PROFILASSI
ALL'AVANGUARDIA.**

Marleen Goossen, Igienista dentale






COSA OFFRE LA GBT

Riduzione del consumo di polvere

GBT adotta la tecnologia AIR-FLOWING®, che integra il dispositivo AIRFLOW® Prophylaxis Master, il manipolo AIRFLOW®MAX e la polvere AIRFLOW®PLUS a base di eritritolo in un sistema sinergico. Questa combinazione garantisce un flusso continuo e stabile di polvere, massimizzando l'efficienza del trattamento e riducendo il consumo di polvere rispetto agli strumenti di pulizia ad aria tradizionali.

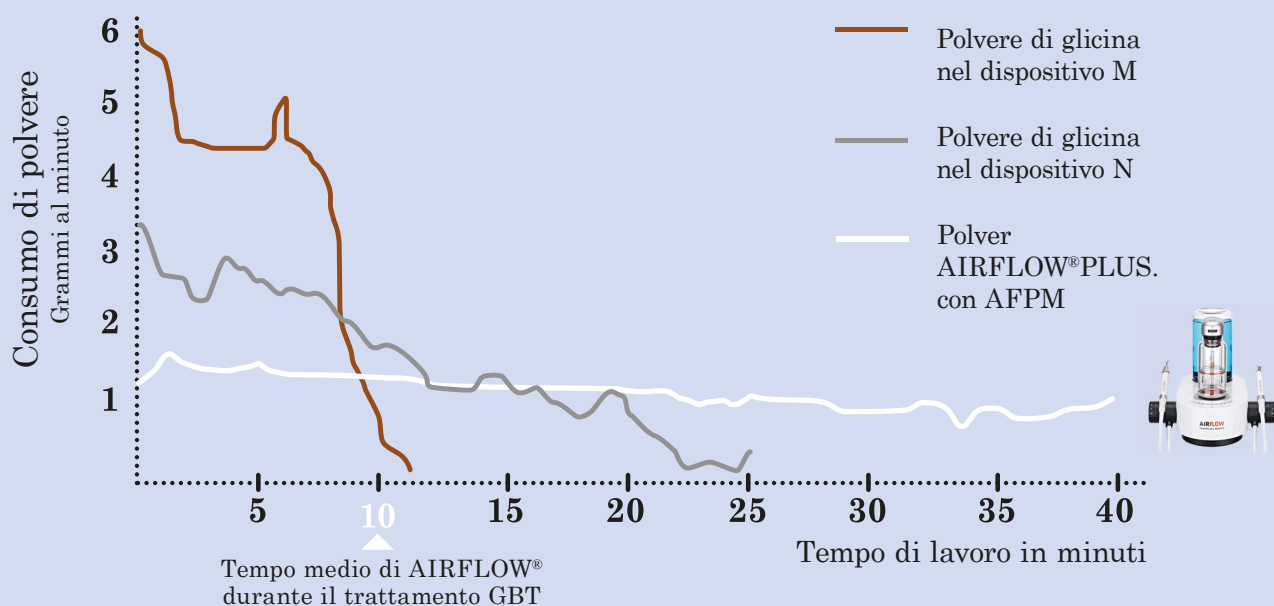

Efficienza e versatilità: trattamenti combinati con il Protocollo GBT

Grazie al protocollo GBT, viene eseguita un'igiene orale completa, consentendo di combinare il trattamento con altre procedure come controlli odontoiatrici, sbiancamenti, scansioni digitali e altro ancora. La GBT, inoltre, ottimizza i tempi di trattamento e facilita la proposta di ulteriori trattamenti. Se necessario, il paziente può essere indirizzato a uno specialista.

64%

DI TUTTI I TRATTAMENTI ODONTOIATRICI ESEGUITI DAI DENTISTI E SPECIALISTI SONO STATI RACCOMANDATI IN SEGUITO AL TRATTAMENTO GBT.

Massima occupazione delle sale di trattamento

La profilassi può incrementare significativamente i ricavi di uno studio dentistico nel lungo periodo. Per questo motivo, è fondamentale garantire la massima occupazione delle sale di trattamento. La Guided Biofilm Therapy (GBT) offre un approccio centrato sul paziente, promuovendo una comunicazione efficace tra il clinico e il paziente. Grazie a trattamenti minimamente invasivi e senza dolore, i pazienti lasciano lo studio soddisfatti. Di conseguenza, non solo raccomanderanno il tuo studio ad altri, ma torneranno anche per ulteriori trattamenti dentali quando necessario.

85%

DEI PAZIENTI TRATTATI CON GBT PRENOTA UN SECONDO APPUNTAMENTO E NON LO SALTA.



Soddisfazione dei dipendenti

La GBT è supportata dalla Swiss Dental Academy (SDA) che offre una formazione su misura ai team degli studi dentistici. La formazione continua garantisce che la profilassi venga eseguita con tecniche all'avanguardia. Questo motiva il team dello studio e porta alla fidelizzazione dei dipendenti. Il reclutamento di nuovi dipendenti è facilitato dal fatto che i professionisti dentali competenti cercano attivamente lavoro in studi dentistici moderni.



SALUTE ORALE E CRESCITA DEL BUSINESS: UN BINOMIO VINCENTE

CLAIRE BERRY SPIEGA PERCHÉ VEDE L'IGIENE DENTALE SIA COME UN'OFFERTA SANITARIA CHE COME UN'OPPORTUNITÀ DI BUSINESS, PER AIUTARE GLI ALTRI A PORTARE AVANTI LA TERAPIA GUIDATA DEL BIOFILM NELLA LORO PRATICA CLINICA

Quando sono arrivata allo Yorkshire Dental Suite, mi sono dedicata a cambiare la percezione su cosa potesse fare un'igienista dentale nel percorso del paziente, introducendo loro la Guided Biofilm Therapy, il mio metodo preferito di rimozione professionale meccanica della placca (PMPR) per ottimizzare la salute orale. In breve tempo, i pazienti hanno cominciato a percepire la mia presenza come essenziale nel loro percorso di trattamento. Il nostro obiettivo era garantire la salute orale prima di iniziare qualsiasi lavoro di restauro o cosmetico. Abbiamo deciso di rinominare i miei servizi per riflettere l'importanza di mettere la salute al primo posto.

La chiave per l'ottimizzazione della salute orale

Abbiamo iniziato a definire il mio ruolo nel processo di trattamento come essenziale per l'ottimizzazione della salute orale. Collaboro attivamente con i pazienti per migliorare la loro salute prima di procedere con ulteriori trattamenti. Una volta raggiunta la salute ottimale, ci assicuriamo di mantenerla con cure a lungo termine. Il nostro obiettivo è garantire che il lavoro svolto perduri nel tempo. Miriamo al successo del trattamento, non solo alla sua sopravvivenza. Il proprietario dello studio, un chirurgo orale, si riferisce a me come punto di riferimento per il suo trattamento quando parla dei miei servizi nel piano terapeutico. Spiega che, quando sono soddisfatta della stabilità e della salute della bocca, può procedere con il piano di trattamento.

SVILUPPARE UN REPARTO ATTIVO

Dopo aver stabilito che l'ottimizzazione della salute orale fosse il nostro obiettivo principale, ci siamo assicurati che tutto il team ne parlasse con la stessa visione. È fondamentale che ogni membro dello studio condivida la stessa filosofia, altrimenti il sistema non funziona efficacemente. Ora i miei servizi sono integrati come parte essenziale di tutti i piani di trattamento restaurativi o cosmetici e sono proposti anche come trattamento preventivo per i pazienti in salute.

COINVOLGIMENTO DEL PAZIENTE

I pazienti sono entusiasti del fatto che la GBT sia orientata al loro comfort, il che rappresenta un grande vantaggio evidente. Apprezzano il mio impegno nel garantire che si sentano a proprio agio sulla mia poltrona. Mi piace particolarmente trattare pazienti che non hanno mai provato la GBT prima, perché sempre lasciano il trattamento elogiandone la completezza e la comodità. Il protocollo mi consente anche di coinvolgere i pazienti e favorire un cambiamento di attitudine. Mi offre il tempo necessario per spiegare in modo semplice come il biofilm sia il nostro avversario, come i pazienti possano gestirlo a casa e perché i controlli periodici siano essenziali per lavorare insieme come squadra nel suo controllo. I richiami non sono mai un problema; i pazienti desiderano tornare per ulteriori trattamenti.

Crescita etica del business

Un aspetto positivo del reparto di igiene è la sua capacità di generare entrate in modo pratico, poiché ogni individuo ha bisogno di visite dall'igienista, considerando che il biofilm continua a riformarsi costantemente. Pertanto, dato che ciascuna persona necessita di questi servizi per il proprio benessere orale, è naturale che ogni paziente che passa per lo studio incontri l'igienista, rendendo questa pratica una scelta etica per favorire la crescita aziendale.

Se il reparto igiene decide di adottare la GBT per ottimizzare la salute orale, l'attenzione al comfort del paziente e all'approccio minimamente invasivo può richiedere un ulteriore investimento.

Tuttavia, questo può essere facilmente compensato. Poiché sentivo che ciò che stavo offrendo ai miei pazienti valesse più del trattamento tradizionale che avevamo fornito in passato, abbiamo aumentato i prezzi dei miei servizi e i pazienti sono stati felici di investire per il valore aggiunto. Essendo l'igienista il punto di riferimento per il trattamento e mostrando l'importanza della salute come priorità, i pazienti sono stati più propensi a scegliere di investire in questo tipo di cura per migliorare il loro piano di trattamento.



”

LO STUDIO È PASSATO DALLA NECESSITÀ DI UN IGIENISTA CHE LAVORASSE SOLO 1-2 GIORNI A SETTIMANA A TROVARSI NELLA SITUAZIONE ATTUALE, DOVE POTREI ESSERE PRESENTE 7 GIORNI SU 7 E COMUNQUE NON SAREBBE SUFFICIENTE, PERCHÉ OGNI PAZIENTE HA BISOGNO DI RICEVERE TRATTAMENTI DI IGIENE ORALE.

Claire Berry, Igienista dentale



**LEGGI L'ARTICOLO
COMPLETO**

GBT CALCULATOR



MENU EN

EMS


BERECHNEN SIE IHR PROPHYLAXE-UMSATZPOTENTIAL

Ihr Praxiserfolg ist unser wichtigstes Anliegen. Das Aufzeigen von Potenzialen und Lösungskonzepten ist Kernbestandteil unserer Beratung. Lassen Sie sich überraschen, welchen Einfluss die richtigen Entscheidungen auf Ihren Erfolg haben können.


Sobald Sie unten geprüft haben, welches Umsatzpotenzial allein im Prophylaxe-Bereich steckt, stehen Ihnen unsere Fachberater*innen gerne für eine detaillierte Analyse zur Verfügung!

Erfolg verbindet.

PROPHYLAXIS CHAIRS IN YOUR PRACTICE

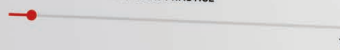

PROPHYLAXIS PATIENTS PER DAY

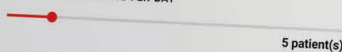

PROPHYLAXIS DAYS PER WEEK



HOW MANY WEEKS PER YEAR IS YOUR PRACTICE OPEN



REVENUE PER TREATMENT




Ihr zusätzliches Umsatzpotenzial liegt bei 39.600 CHF

Download report


**SCOPRI IL POTENZIALE ECONOMICO
DEL TUO REPARTO DI IGIENE**

PROVA ORA

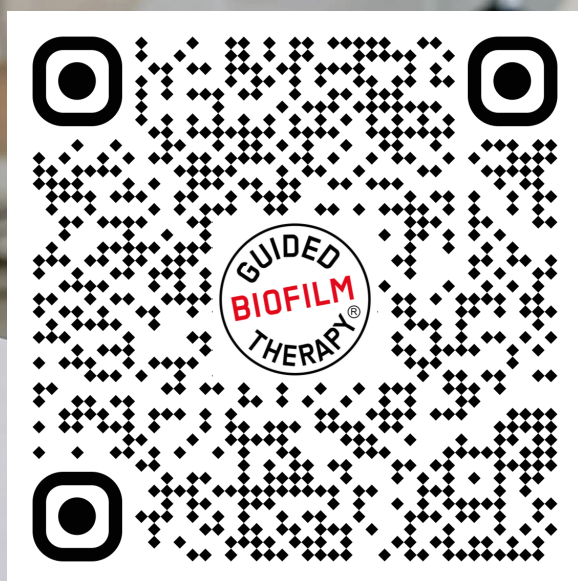



MOLAR
CLINIC

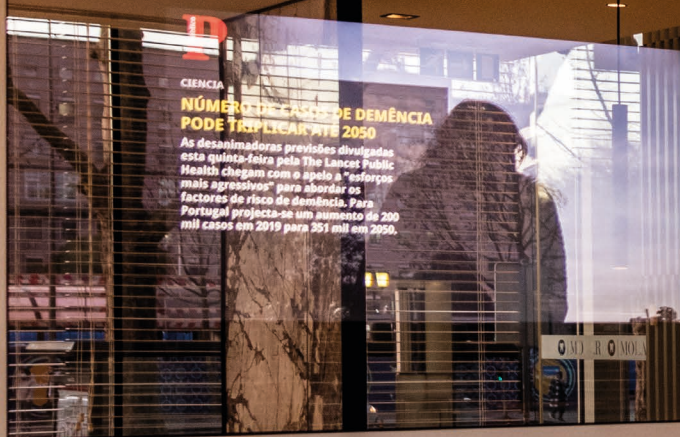

LEGGI L'ARTICOLO
COMPLETO



”

NEL MIO RUOLO DI
RESPONSABILE DI
CLINICA, È EVIDENTE LA
REDDITIVITÀ DELLA GBT
GRAZIE AI RISCONTRI
POSITIVI DEI PAZIENTI.

Dr. João Mouzinho, Dentista

PROMUOVI IL TUO STUDIO


ESPANDI LA TUA PRESENZA SU DIVERSI CANALI

Una strategia efficace sui social media può attrarre un pubblico più ampio alla tua clinica.

Con la Certificazione GBT, ti offriamo strumenti efficaci per essere presenti sui social media e comunicare ai pazienti i benefici distintivi del protocollo GBT.

INCREMENTA LA TUA VISIBILITÀ

Grazie alla certificazione GBT, il tuo studio apparirà sul GBT Finder, una mappa interattiva online che guida i pazienti interessati alla profilassi verso lo studio GBT più vicino.

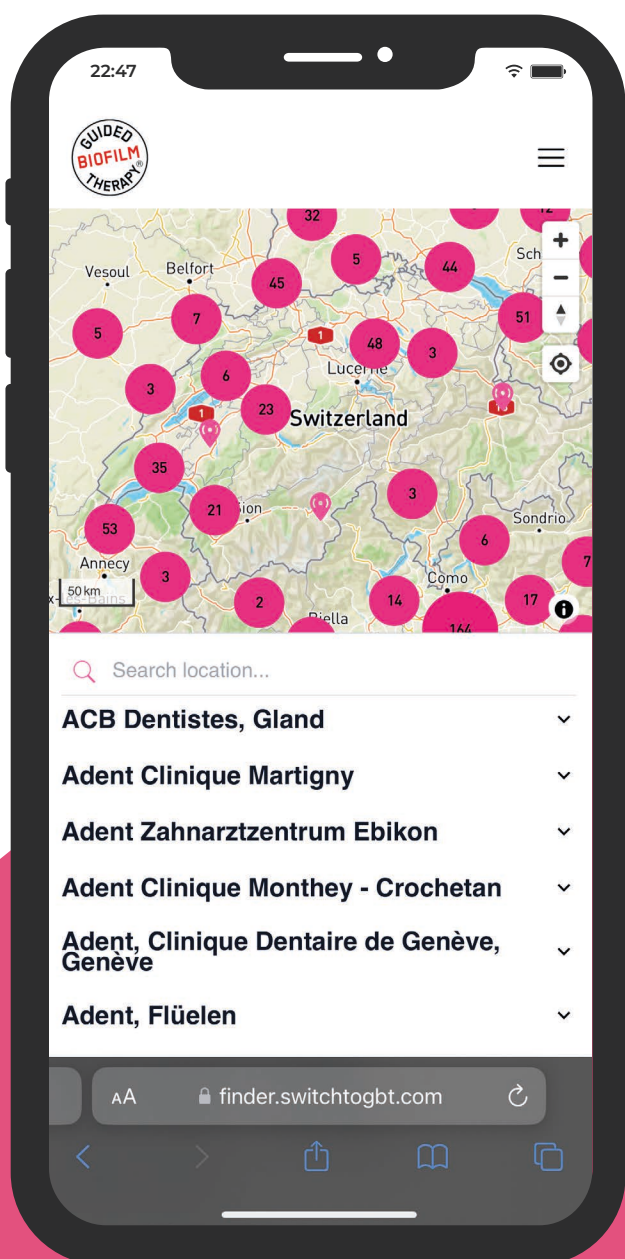

ACCEDI
AL GBT
FINDER

”

LA CERTIFICAZIONE
GBT HA AUMENTATO
LA NOSTRA VISIBILITÀ,
MIGLIORATO LA
PRESENZA SUI SOCIAL
MEDIA E OFFERTO ALTRI
BENEFICI SIGNIFICATIVI!

Mudr. Sabina Moravcová, All-Dente

RENDI LE INFORMAZIONI FACILMENTE ACCESSIBILI

Mantenere aggiornato il sito web è fondamentale per fornire informazioni aggiornate sulla tua clinica ai pazienti attuali e futuri. Un sito web moderno e accattivante contribuisce a creare un'immagine positiva della tua struttura sanitaria.



RIDUCIAMO AL MINIMO I TRATTAMENTI INVASIVI

"LA GBT È DELICATA, EFFICIENTE, MINIMAMENTE INVASIVA E GARANTISCE SEMPRE IL MASSIMO DELLA QUALITÀ"

GBT SUCCESS STORY:

Sono il Dr. Kilian Hansen, e insieme all'ortodontista Dr. Felix Lampe gestisco uno studio odontoiatrico di grande successo. Ci siamo conosciuti durante i nostri anni universitari e abbiamo sempre avuto il progetto di collaborare. Per noi è fondamentale adottare un approccio che metta al centro il benessere del paziente, basato sulle più recenti evidenze scientifiche. Ci impegniamo a ridurre al minimo gli interventi odontoiatrici invasivi, concentrandoci sul trattamento del biofilm. Utilizziamo la GBT (Guided Biofilm Therapy), con il dispositivo AIRFLOW® Prophylaxis Master per rimuovere il biofilm con un flusso d'aria, acqua calda e una polvere delicata, garantendo una pulizia accurata dei denti. Poiché offriamo trattamenti parodontali, conservativi e ortodontici all'interno dello stesso studio, la GBT si adatta perfettamente alle nostre esigenze.

Abbiamo testato il dispositivo AIRFLOW® Prophylaxis Master e, una volta constatato il suo eccellente rendimento, ne abbiamo acquistato un altro per la nostra seconda sala per la profilassi. Dopo aver constatato che superava di gran lunga l'attrezzatura precedente, decisamente inferiore, abbiamo optato per l'acquisto di un terzo dispositivo da utilizzare nel reparto di ortodonzia.

TEAM MOTIVATO

Inizialmente, alcuni membri del nostro team erano scettici riguardo al nuovo approccio e si chiedevano: "Perché non possiamo seguire la procedura come abbiamo sempre fatto?" Tuttavia, grazie all'eccellente formazione fornita dalla Swiss Dental Academy sull'utilizzo della GBT, presto tutti sono stati conquistati e hanno riconosciuto rapidamente i vantaggi del nuovo protocollo. C'è stato un autentico cambio di mentalità nel nostro staff: ora tutti comprendono che la GBT è indolore, delicata, minimamente invasiva e offre un reale aiuto ai pazienti. Questo trattamento mira al biofilm, la radice del problema che causa la carie e le malattie gengivali.

PAZIENTI:

È chiaro che i nostri pazienti riconoscono i vantaggi della GBT, come dimostra l'alto numero di prenotazioni ricorrenti che riceviamo per questo trattamento.

Le persone tornano regolarmente e spesso prenotano tre appuntamenti di controllo - sufficienti per un intero anno - in anticipo.

La GBT è senza dubbio un beneficio per la nostra pratica. I nostri pazienti si dividono principalmente in due gruppi. Per i pazienti più anziani, la manutenzione è fondamentale, mentre i giovani preferiscono un trattamento rapido e semplice, il meno doloroso possibile. Ciò che accomuna entrambi i gruppi è la richiesta di un trattamento delicato, poco invasivo e il meno doloroso possibile, con risultati duraturi nel tempo. Qui la GBT si rivela estremamente vantaggiosa.

Utilizzando il rilevatore di placca durante la GBT, posso identificare con precisione le aree della bocca che richiedono attenzione. Questo mi permette di sapere esattamente come procedere e di mostrare chiaramente ai pazienti cosa è necessario trattare.

Mostrare ai pazienti le aree colpite dalla carie e l'efficacia della GBT li motiva a prendersi cura dei propri denti e a tornare per ulteriori controlli. Entrambi i gruppi di pazienti traggono vantaggio dalla GBT.

CERTIFICAZIONE

Abbiamo scelto di ottenere la certificazione GBT non solo per migliorare il nostro marketing, ma soprattutto perché vogliamo offrire un servizio eccellente e mantenere una qualità costante. Nel processo di certificazione, riceviamo feedback e sottoponiamo il nostro servizio a un controllo, il che ci consente di imparare e migliorare continuamente.

Dr. Kilian Hansen, dentista

KIEFERORTHOPÄDE⁺ ZAHNARZT

DR. LAMPE | DR. HANSEN | DR. C. STRAUB | DR. P. STRAUB



**LEGGI L'ARTICOLO
COMPLETO**

LAMPE, HANSEN & STRAUB - GROUP PRACTICE, GERMANIA



L'IMPATTO DELLA GBT

PRIMA DELLA GBT



DOPO LA LOCALIZZAZIONE



6 MESI DOPO LA GBT



GBT È UNA RIVOLUZIONE ASSOLUTA



Il protocollo GBT ha portato un cambiamento positivo evidente nel nostro studio. Ha reso il nostro lavoro estremamente efficiente, il che è stato il nostro principale beneficio. Inoltre, ha migliorato sensibilmente il livello dei servizi che offriamo. Questo si riflette soprattutto nella riduzione dei tempi di trattamento, che ci consente di dedicare molto più tempo alla comunicazione con il paziente, un aspetto cruciale per l'igiene orale e per la cooperazione del paziente. Seguire le fasi ben definite del protocollo GBT si adatta perfettamente al nostro approccio e garantisce a tutti un elevato standard di cura.



Mudr. Sabina Moravcová, All-Dente

E-BOOK 100 CASI CLINICI GBT

Scopri la svolta nella profilassi orale con l'eBook "100 Casi Clinici GBT". Questa nuova edizione, basata sul successo delle due precedenti, presenta una raccolta aggiornata di casi clinici che evidenziano l'efficacia continua del protocollo Guided Biofilm Therapy.



© FA-876/IT rev.A Edizione 2024/07

