

GBT

JEST

NARZĘDZIEM

DO ROZWOJU

PRAKTYKI



#IAMGBT

KOMPAS **GBT** I JEGO

08 PLAN WIZYT

ZDROWY PACJENT = SZCZĘŚLIWY PACJENT

- ▶ Zaplanuj harmonogram wizyt w zależności od potrzeby klinicznej
- ▶ Zapytaj pacjenta o jego wrażenia po zabiegu

07 KONTROLA

PODARUJ UŚMIECH SWOJEMU PACJENTOWI

- ▶ Upewnij się, że biofilm i kamień zostały usunięte
- ▶ Dokładnie zdiagnozuj próchnicę
 - ▶ Zabezpiecz fluorem
- ▶ Koniec z polerowaniem

06 PIEZON® PS





USUŃ POZOSTAŁY KAMIEŃ

- ▶ Użyj minimalnie inwazyjnej końcówki EMS PIEZON® PS nad- i poddziąsłowo do 10 mm ▶ Wyczyść kieszonki >10 mm za pomocą kirety mini ▶ Użyj końcówki EMS PIEZON® PI MAX wokół implantów i uzupełnień protetycznych do 3 mm poddziąsłowo

05 PERIOFLOW®

USUŃ BIOFILM Z KIESZONEK OD 4 DO 9 MM

- ▶ Użyj piasku AIRFLOW® PLUS w głębokich kieszkach przy naturalnych zębach, furkacjach korzeni i implantach
- ▶ Zastosuj nową i smuklejszą końcówkę PERIOFLOW® Nozzle

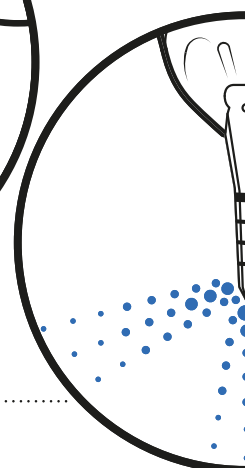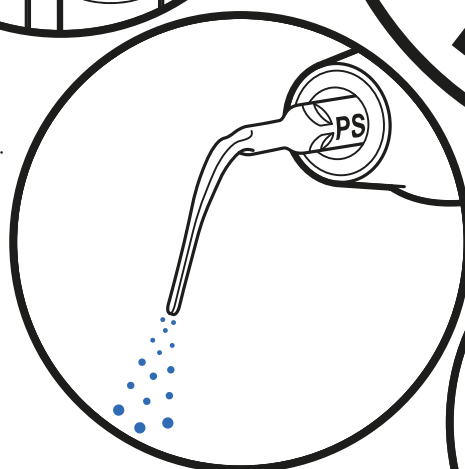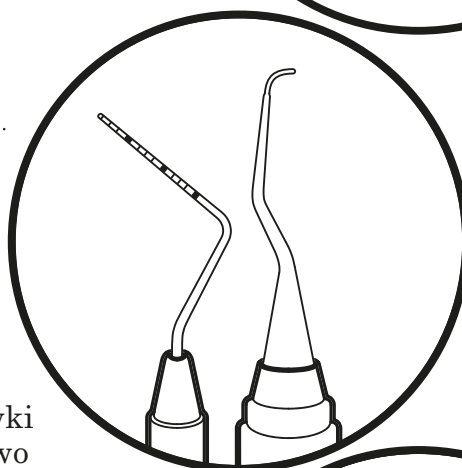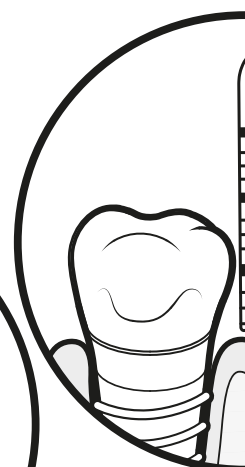

PROTOKÓŁ 8 KROKÓW



01 OCENA I KONTROLA INFЕКCJI

OCEŃ KAŻDY PRZYPADEK KLINICZNY
I ZASTOSUJ ŚRODKI OCHRONY

- Rozpocznij od przepłukania jamy ustnej pacjenta płynem BacterX® Pro
- Dokonaj oceny zębów, dziąseł i tkanek przyzębia ► Dokonaj oceny implantów i otaczających ich tkanek

02 WYBARWIANIE

UWIDOCZNIJ BIOFILM

- Używając gąbeczek wybarwiających EMS Biofilm Discloser, wskaż pacjentowi obszary, których nie doczyszczają
- Kolor ułatwi usuwanie biofilmu
- Po usunięciu biofilmu, kamień jest łatwiejszy do wykrycia

03 MOTYWACJA

ZWIĘKSZ ŚWIADOMOŚĆ I EDUKUJ

- Podkreśl rolę profilaktyki
- Przeprowadź instruktaż higieny jamy ustnej
 - EMS zaleca stosowanie szczoteczek elektrycznych, międzyzębowych oraz irygatorów

04 AIRFLOW® MAX

USUŃ BIOFILM, OSADY I WSTĘPNIE
ZMINERALIZOWANY KAMIEŃ

- Użyj AIRFLOW® MAX na naturalnych zębach, wypełnieniach i implantach
- Usuń biofilm nad- i poddziąsłowo do 4 mm, używając piasku AIRFLOW PLUS® 14 µm
- Usuń biofilm również z dziąseł, języka i podniebienia
- Usuń pozostałe osady na szklivie używając piasku AIRFLOW® CLASSIC Comfort





”

**ZESPÓŁ TO LUBI, PACJENCI TO
LUBIĄ. POLECAM GBT.**

Dr François Veuve
Gabinet stomatologiczny des Halles



DR VEUVE, NEUCHÂTEL, SZWAJCARIA



WYJAŚNIENIE 8 KROKÓW



KROK 1 OCENA I KONTROLA INFEKCJI

Przed rozpoczęciem leczenia należy ocenić jamę ustną, aby ocenić stan zdrowia (jamy ustnej) pacjenta. Ten krok daje możliwość przygotowania się do nadchodzącego zabiegu.



KROK 2 WYBARWIENIE

Środek wybarwiający sprawia, że biofilm jest widoczny - można usuwać tylko to, co widać. Wybarwienie prowadzi klinicystę przez zabieg, zapobiega nadmiernemu używaniu urządzeń/instrumentów i poprawia zrozumienie domowej pielęgnacji jamy ustnej przez pacjenta.




KROK 3 MOTYWACJA

Długoterminowy stan zdrowia jamy ustnej można osiągnąć jedynie poprzez połączenie regularnego profesjonalnego czyszczenia zębów i dobrej codziennej domowej pielęgnacji jamy ustnej. Pacjent musi rozumieć znaczenie pielęgnacji domowej i znać najlepsze techniki dla jego indywidualnych potrzeb.



KROK 4 AIRFLOW® MAX

Widoczny biofilm można skutecznie usunąć dzięki laminarnemu strumieniowi wody i piasku. Piasek PLUS można zastosować w 100% wszystkich przypadków, usuwając biofilm nad i poddiąsłowo, zapewniając pacjentowi minimalnie inwazyjne i komfortowe leczenie.

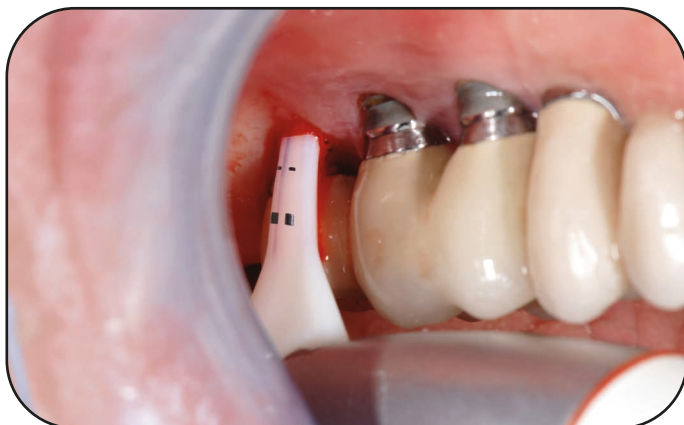

KROK 5 PERIOFLOW®

Biofilm poddziąsłowy musi być bezpiecznie usunięty. Smukły i elastyczny nozle PERIOFLOW® zapewnia lepszy dostęp. Zabieg za pomocą PERIOFLOW® służy jako wstępna i podtrzymująca (SPT) terapia periodontologiczna, a także wstępne i podtrzymujące leczenie mucositis i peri-implantitis.



KROK 6 PIEZON® PS

Pozostały kamień nazębny jest usuwany bezboleśnie i bez uszkodzania szkliwa dzięki dynamicznej regulacji mocy i modułowi NO PAIN.



KROK 7 KONTROLA

Wcześniej ukryta próchnica lub inne problemy są teraz widoczne, dzięki czemu pacjenta można skierować do stomatologa lub specjalisty.



KROK 8 PLAN WIZYT

Długotrwałe zdrowie jamy ustnej można utrzymać tylko poprzez ciągłe zabiegi profilaktyczne. Kolejna wizyta recall jest ustalana zgodnie z potrzebami pacjenta, aby zaoferować zindywidualizowany plan leczenia. Wizyta recall służy jako wskazówka, czy pacjent był zadowolony z leczenia.



”

**PROGRAM CERTYFIKACJI GBT
ZWIĘKSZA WIDOCZNOŚĆ I
ZNACZENIE MOJEJ PRAKTYKI
ORAZ WYKONYWANEJ PRZEZ
NAS PRACY. CHCIAŁEM BYĆ
NA BIEŻĄCO ZARÓWNO POD
WZGLĘDEM KLINICZNYM, JAK
I BIZNESOWYM.**

Dr Gianandre A Poggi, stomatolog



**PRZECZYTAJ CAŁY
ARTYKUŁ**

”

PO ROKU POTROILIŚMY LICZBĘ WIZYT!

Dr Gianandre A Poggi, stomatolog



PRZYCHODY GABINETU

**70% BEZPOŚREDNICH PRZYCHODÓW
POCHODZI OD STOMATOLOGÓW***




***64% WSZYSTKICH PRAC
STOMATOLOGICZNYCH WYKONANYCH
PRZEZ STOMATOLOGA I SPECJALISTĘ
ZOSTAŁO SKIEROWANYCH PO
ZABIEGU GBT**

**30% BEZPOŚREDNICH DOCHODÓW
POCHODZI OD HIGIENIISTEK**


Na podstawie studium przypadku 24 gabinetów stomatologicznych w Szwajcarii

PRZYKŁAD SZWAJCARSKIEJ SIECI GABINETÓW STOMATOLOGICZNYCH

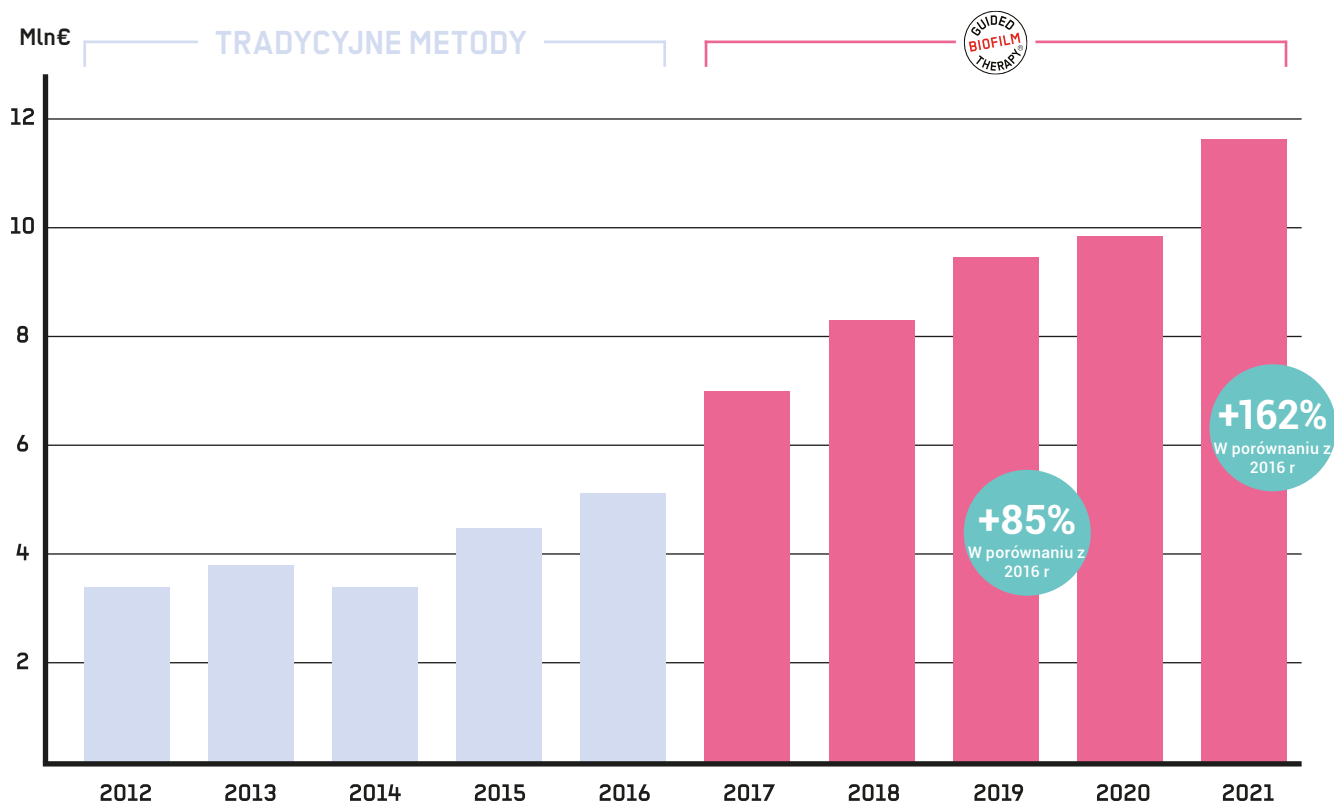

Oto przykład DSO (cykl rotacji należności) z 24 klinik stomatologicznych, które wdrożyły GBT w 2017 roku.
Ten DSO prawie się podwoił na koniec 2019 r. (85%)


ŚREDNI PRZYCHÓD NA GODZINĘ

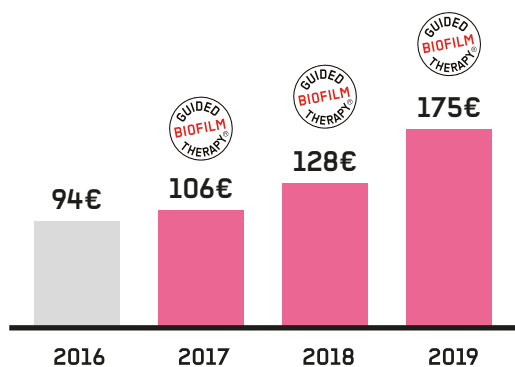

Przychody na godzinę wzrosły o 86% w tym okresie

ŚREDNIA LICZBA KONSULTACJI ROCZNIE

Na higienistkę stomatologiczną

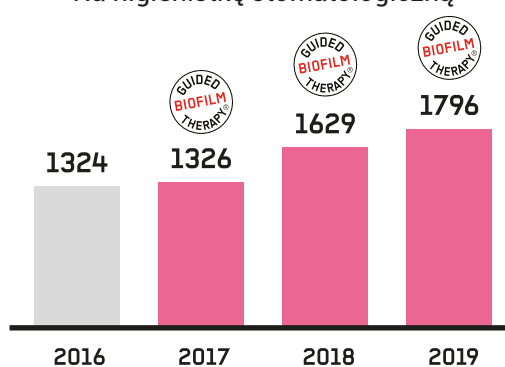

Widzimy korzyści płynące z modelu stałej opieki, z 36% wzrostem średniej liczby konsultacji

Brak podwyżki cen w tym okresie

”

**UWIELBIAM OFEROWAĆ MOIM
PACJENTOM DOŚWIADCZENIE SPA,
JEDNOCZEŚNIE ZAPEWNIAJĄC IM
SPECJALISTYCZNĄ
PROFILAKTYKĘ**

Marlena Goossen, higienistka stomatologiczna






SWISS DENTAL SPA, DE BILT, HOLLANDIA



CO OFERUJE GBT

Zmniejszone zużycie energii

GBT wykorzystuje technologię AIR-FLOWING®, łącząc w synergii AIRFLOW® Prophylaxis Master, rękojeść AIRFLOW® MAX i piasek AIRFLOW® PLUS na bazie erytrytolu. Ciągły i jednolity przepływ piasku w połączeniu z maksymalną wydajnością zabiegową prowadzi do zmniejszonego zużycia piasku w porównaniu do tradycyjnego piaskowania.

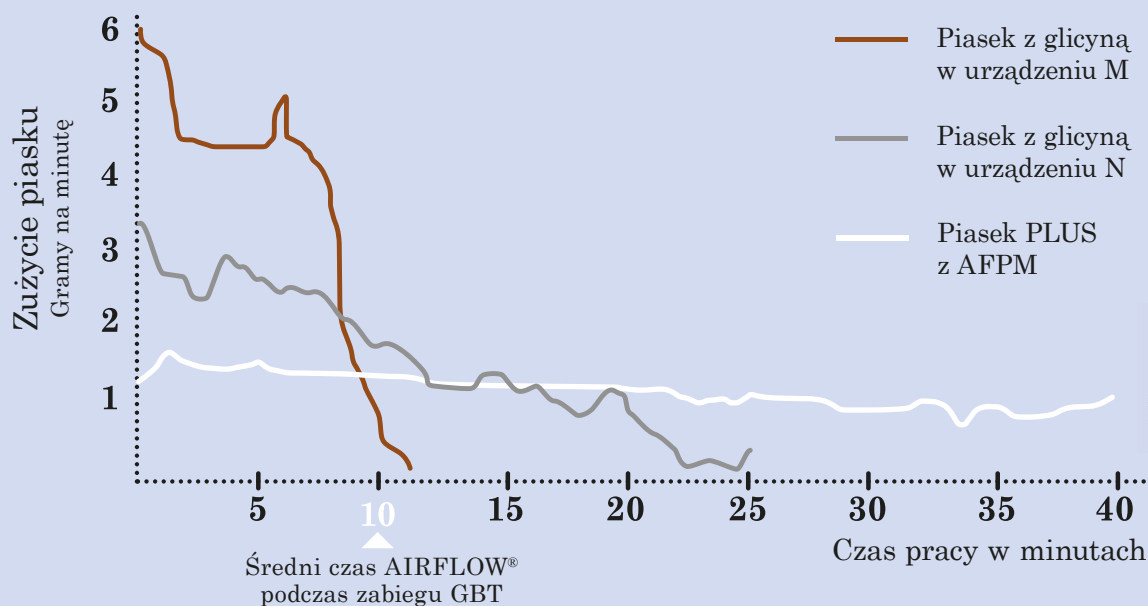

Wydajność: Zabiegi łączone

Ponieważ GBT dokładnie czyści jamę ustną, leczenie można kontynuować, a zatem łączyć z innymi zabiegami, takimi jak wizyty kontrolne u stomatologa, zabiegi wybielające, skanowanie cyfrowe i inne. Dzięki temu można efektywniej wykorzystać czas i zaproponować dalsze leczenie. W razie potrzeby pacjenta można skierować do specjalisty.

64%


WSZYSTKICH ZABIEGÓW STOMATOLOGICZNYCH
PRZEPROWADZONYCH PRZEZ STOMATOLOGA LUB
SPECJALISTĘ ZOSTAŁO PRZEPROWADZONYCH PO GBT

Obłożenie

Profilaktyka może w dłuższej perspektywie zwiększyć przychody gabinetu stomatologicznego. Dlatego kluczowym elementem jest maksymalne obłożenie gabinetów zabiegowych. GBT oferuje podejście ukierunkowane na pacjenta, koncentrując się na komunikacji między klinicystą a pacjentem. Minimalnie inwazyjne, bezbolesne leczenie oznacza, że pacjenci wychodzą zadowoleni. Będą zatem polecać Twoją praktykę innym i w razie potrzeby wrócą na dalsze zabiegi stomatologiczne.

85%

**WSKAŹNIK WIZYT RECALL DZIĘKI
WYSOKIEJ SATYSFAKCJI PACJENTÓW**

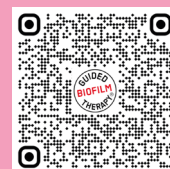

Zadowolenie pracowników

GBT jest wspierana przez Swiss Dental Academy (SDA), oferującą kształcenie dostosowane do potrzeb zespołów danej praktyki. Ciągłe kształcenie zapewnia prowadzenie profilaktyki z wykorzystaniem najnowocześniejszych technik. Motywuje to zespół praktyki, co ostatecznie prowadzi do zatrzymania pracowników. Rekrutacja nowych pracowników jest łatwiejsza, ponieważ kompetentni dentyści aktywnie poszukują pracy w nowoczesnych gabinetach stomatologicznych.



OPTIMALIZACJA ZDROWIA JAMY USTNEJ DLA ROZWOJU BIZNESU

CLAIRE BERRY WYJAŚNIA DLACZEGO POSTRZEGA HIGIENĘ JAMY USTNEJ ZARÓWNO JAKO OFERTĘ ZDROWOTNĄ, JAK I SZANSĘ BIZNESOWĄ, ABY POMÓC INNYM W ROZWOJU GUIDED BIOFILM THERAPY W ICH PRAKTYCE

Kiedy zaczęłam pracę w Yorkshire Dental Suite, postanowiłam zmienić ich postrzeganie tego, co higienistka stomatologiczna może zrobić w pracy z pacjentem, wprowadzając ich w Guided Biofilm Therapy (GBT), który jest wybraną przeze mnie formą profesjonalnego mechanicznego usuwania płytki nazębnej (PMPR) w celu optymalizacji zdrowia jamy ustnej. Bardzo szybko pacjenci przychodzący do mnie na wizyty, stali się integralną częścią procesu leczenia. Celem było zapewnienie zdrowia przed rozpoczęciem leczenia zachowawczego lub prac estetycznych. Zdecydowaliśmy, że należy zmienić nazwę moich usług, aby odzwierciedlić znaczenie stawiania zdrowia na pierwszym miejscu.

STRAŻNIK OPTIMALIZACJI ZDROWIA JAMY USTNEJ

Zaczęliśmy nazywać moją rolę w procesie leczenia "optymalizacją zdrowia jamy ustnej". Pracuję z pacjentem, aby zoptymalizować zdrowie przed dalszym leczeniem. Kiedy zdrowie zostanie osiągnięte, utrzymujemy optymalny stan zdrowia jamy ustnej przez całe życie. Oznacza to, że wykonana przez nas praca będzie trwała. Naszym celem jest sukces leczenia, a nie przetrwanie. Właściciel praktyki, chirurg jamy ustnej, nazywa mnie strażnikiem jego leczenia, gdy mówi o moich usługach w planie leczenia. Wyjaśnia, że kiedy ja jestem szczęśliwa, że wszystko jest stabilne i zdrowe, to on może kontynuować plan leczenia.

ROZWÓJ PRACOWITEGO DZIAŁU HIGIENY

Po ustaleniu, że optymalizacja zdrowia jamy ustnej jest sposobem, w jaki chcemy, aby wszystko działało, upewniliśmy się, że cały zespół wypowiadał się o tym w ten sam sposób. Ważne jest, aby wszyscy w gabinecie mówili tym samym głosem, w przeciwnym razie system nie zadziała. Moje usługi są teraz postrzegane jako "dział zdrowia jamy ustnej", a nie jako samodzielny zabieg, do którego pacjenci są kierowani w razie potrzeby. Jest to integralna część wszystkich planów leczenia zachowawczego lub estetycznego oraz jako zabieg profilaktyczny nawet dla naszych zdrowych pacjentów.

ZAANGAŻOWANIE PACJENTA

Pacjenci uwielbiają fakt, że GBT skupia się na ich komforcie, co jest oczywiście dużym plusem. Doceniają, że postarałam się, aby czuli się komfortowo na moim fotelu. Uwielbiam przyjmować pacjentów, którzy nigdy wcześniej nie doświadczyli GBT, ponieważ zawsze wychodzą, mówiąc, jak dokładny był zabieg, a jednocześnie komfortowy. Protokół pozwala mi także nawiązywać kontakt z pacjentami i wpływać na zmianę ich zachowania. Daje mi czas na wyjaśnienie w łatwy do zrozumienia sposób, dlaczego biofilm jest naszym wrogiem, w jaki sposób pacjenci powinni kontrolować go w domu i dlaczego konieczne są wizyty recall, abyśmy mogli pracować jako zespół, aby utrzymywać kontrolę nad biofilmem. Kolejne wizyty nigdy nie stanowią problemu; pacjenci chcą wracać na zabieg.

ETYCZNY ROZWÓJ BIZNESU

Wspaniałą rzeczą działu higieny jest to, że zapewnia on łatwo osiągalne źródło przychodów z tego względu, że każdy musi udać się do higienistki, ponieważ biofilm nigdy nie przestaje się gromadzić. Tak więc, jeśli każda osoba potrzebuje usług higienistki, wówczas każda osoba będąca pacjentem praktyki powinna postrzegać higienistkę jako coś oczywistego, co czyni jej usługi etycznym strumieniem dla rozwoju biznesu.

Jeśli Twój dział higieny wybiera GBT jako formę optymalizacji zdrowia jamy ustnej, wówczas inwestycja w zapewnienie komfortu pacjenta i przyjęcie minimalnie inwazyjnego podejścia może się opłacić.

Jednak można to łatwo zrównoważyć. Ponieważ czułam, że to, co oferowałam moim pacjentom, było warte więcej niż konwencjonalne leczenie, które oferowaliśmy wcześniej, podnieśliśmy ceny mojego leczenia, a pacjenci chętnie płacili za wartość dodaną. Traktuj swoją higienistkę jako strażnika leczenia, a gdy pacjenci docenią wagę jaką Ty, jako klinicysta, kładziesz na zdrowie, to będą chcieli zainwestować w tego rodzaju opiekę, aby ulepszyć swój plan leczenia.



”


**PRAKTYKA PRZESZŁA OD
ZAPOTRZEBOWANIA NA
HIGIENISTKĘ PRACUJĄCĄ 1-2
DNI W TYGODNIU DO MIEJSCA,
W KTÓRYM JESTEŚMY TERAZ,
A JA MOGŁABYM BYĆ TUTAJ 7
DNI W TYGODNIU I NADAL NIE
BYŁOBY TO WYSTARCZAJĄCE,
PONIEWAŻ KAŻDY PACJENT
MUSI PRZYJŚĆ DO MNIE.**

Claire Berry, Higienistka stomatologiczna



**PRZECZYTAJ CAŁY
ARTYKUŁ**

KALKULATOR GBT

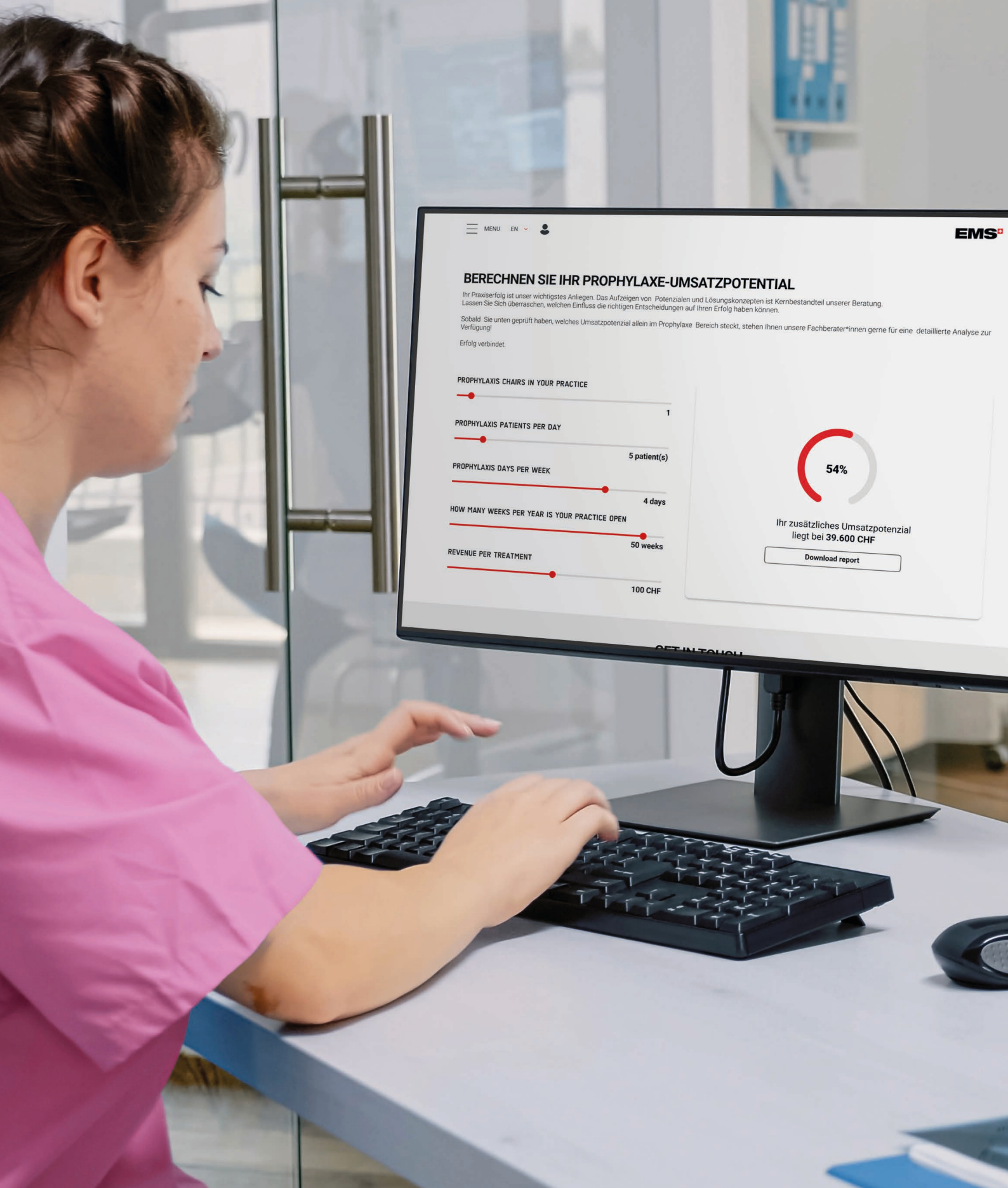

MENU EN

EMS


BERECHNEN SIE IHR PROPHYLAXE-UMSATZPOTENTIAL

Ihr Praxiserfolg ist unser wichtigstes Anliegen. Das Aufzeigen von Potenzialen und Lösungskonzepten ist Kernbestandteil unserer Beratung. Lassen Sie sich überraschen, welchen Einfluss die richtigen Entscheidungen auf Ihren Erfolg haben können.


Sobald Sie unten geprüft haben, welches Umsatzpotenzial allein im Prophylaxe-Bereich steckt, stehen Ihnen unsere Fachberater*innen gerne für eine detaillierte Analyse zur Verfügung!

Erfolg verbindet.

PROPHYLAXIS CHAIRS IN YOUR PRACTICE

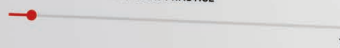

PROPHYLAXIS PATIENTS PER DAY

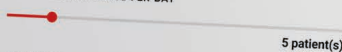

PROPHYLAXIS DAYS PER WEEK



HOW MANY WEEKS PER YEAR IS YOUR PRACTICE OPEN



REVENUE PER TREATMENT




Ihr zusätzliches Umsatzpotenzial liegt bei 39.600 CHF

Download report


ODKRYJ POTENCJAŁ FINANSOWY
SWOJEGO DZIAŁU HIGIENY

PRZETESTUJ TERAZ

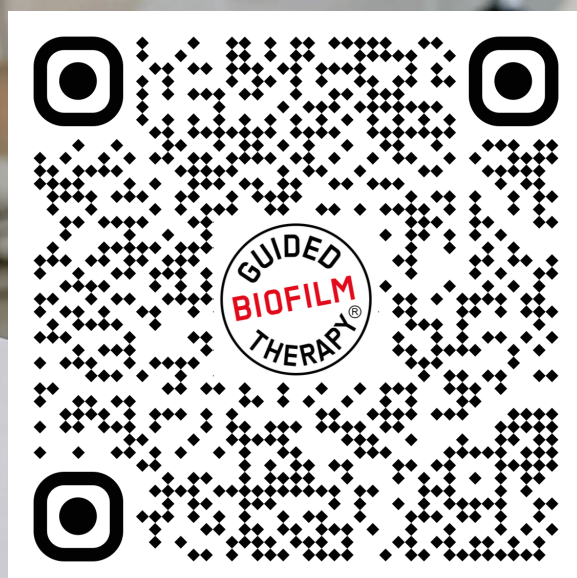



MOLAR
CLINIC

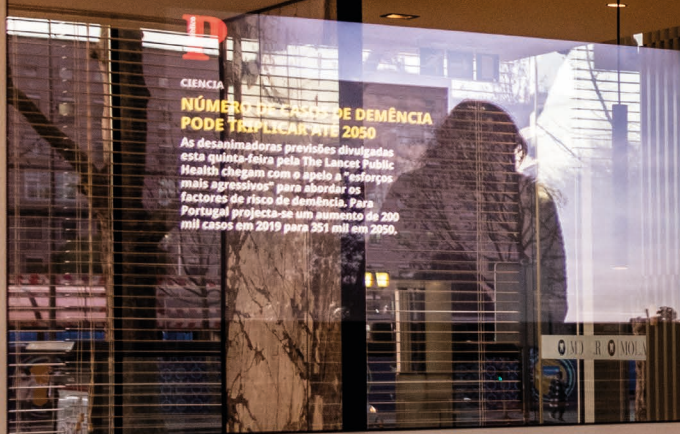

PRZECZYTAJ CAŁY
ARTYKUŁ



”

JAKO KIEROWNIK KLINIKI
WIDZĘ OPŁACALNOŚĆ
GBT ZE WZGLĘDU NA
POZYTYWNE OPINIE
PACJENTÓW.

Dr. João Mouzinho, stomatolog

PROMUJ SWOJĄ PRAKTYKĘ


BĄDŹ OBECNY NA RÓŻNYCH KANAŁACH

Dobrze zorganizowana obecność Twojej kliniki w mediach społecznościowych* może pomóc przyciągnąć młodszych pacjentów.

*Praktyki z certyfikatem GBT otrzymują wyłączny dostęp do materiałów promocyjnych związanych z GBT.

BĄDŹ WIDOCZNY

Posiadając certyfikat GBT, Twoja praktyka pojawi się w wyszukiwarce GBT Finder - ogólnosiwiatowej mapie prowadzącej zainteresowanych profilaktyką pacjentów do najbliższej praktyki GBT.

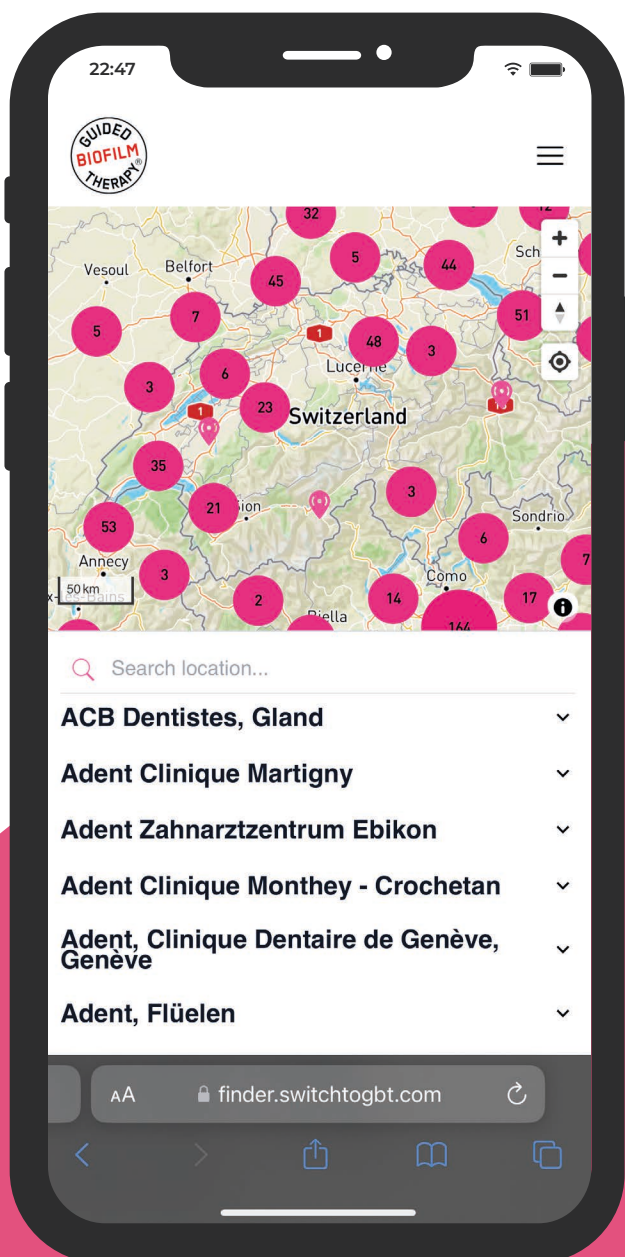

UZYSKAJ DOSTĘP
DO
WYSZUKIWARKI
GBT

”

"DOCENIAM
WIDOCZNOŚĆ NA MAPIE
CERTYFIKOWANYCH
GABINETÓW
GBT, WSPARCIE
MARKETINGOWE I INNE
DODATKOWE KORZYŚCI".

Mudr. Sabina Moravcova, All-Dente

ZAPEWNIJ ŁATWY DOSTĘP DO INFORMACJI

Aktualizuj swoją stronę internetową, aby dostarczać informacji o swojej praktyce (przyszłym) pacjentom. Nowoczesna i atrakcyjna strona internetowa pomaga stworzyć pozytywny wizerunek kliniki.



MINIMALIZUJEMY INWAZYJNE ZABIEGI STOMATOLOGICZNE

"GBT JEST DELIKATNE, SKUTECZNE, MINIMALNIE INWAZYJNE I KONSEKWENTNIE ZAPEWNIĄ WYSOKĄ JAKOŚĆ"

HISTORIA SUKCESU GBT:

Nazywam się dr Kilian Hansen - prowadzę odnoszącą sukcesy praktykę stomatologiczną wraz z ortodontą dr. Felixem Lampe. Znamy się od czasów studiów i zawsze planowaliśmy pracować razem. Bardzo ważne jest dla nas znalezienie sposobu pracy, który stawia na pierwszym miejscu komfort pacjenta, a jednocześnie opiera się na najnowszych dowodach naukowych. Ograniczamy inwazyjne prace stomatologiczne do absolutnego minimum poprzez kontrolowanie biofilmu. GBT (Guided Biofilm Therapy) wykorzystuje system AIRFLOW® Prophylaxis Master do dostarczania strumienia powietrza i ciepłej wody z delikatnym piaskiem w celu usunięcia biofilmu i dokładnego oczyszczenia zębów. Ponieważ oferujemy leczenie periodontologiczne, zachowawcze i ortodontyczne w jednym gabinecie, GBT jest dla nas idealnym rozwiązaniem.

Wypróbowaliśmy AIRFLOW® Prophylaxis Master i gdy tylko zobaczyliśmy jak dobrze działa, kupiliśmy kolejny do naszego drugiego gabinetu profilaktycznego. A potem, widząc, że przewyższa on nasz stary sprzęt, zakupiliśmy trzeci AIRFLOW® Prophylaxis Master do stosowania w ortodoncji.

ZESPÓŁ PRAKTYKI:

Kilku pracowników było początkowo sceptycznie nastawionych do nowego podejścia i powiedziało: "Dlaczego nie możemy przeprowadzić procedury w sposób, w jaki zawsze to robiliśmy?" Ale Swiss Dental Academy - która zapewnia doskonałe szkolenie w zakresie korzystania z GBT - wkrótce przekonała wszystkich i cały zespół szybko dostrzegł zalety nowego podejścia. Nastąpiła prawdziwa zmiana w myśleniu naszego personelu - wszyscy rozumieją, że GBT jest bezbolesne, delikatne, minimalnie inwazyjne i naprawdę pomaga pacjentom. Kontroluje biofilm - problem, który faktycznie powoduje próchnicę i choroby dziąseł.

PACJENCI:

To oczywiste, że nasi pacjenci dostrzegają korzyści wynikające z GBT, sądząc po liczbie kolejnych umawianych wizyt, jakie otrzymujemy w ramach tego procesu.

Pacjenci wracają wielokrotnie i czasami planują trzy wizyty recall - z rocznym wyprzedzeniem.

Nie ma wątpliwości, że GBT jest korzystne dla naszej praktyki. Mamy dwie główne grupy pacjentów. Dla naszych starszych pacjentów priorytetem jest utrzymanie uzębienia, podczas gdy młodzi pacjenci chcą szybkiego, nieskomplikowanego zabiegu, który jest tak bezbolesny, jak to tylko możliwe. Obie grupy łączy to, że chcą jak najdelikatniejszego, najmniej inwazyjnego i najmniej bolesnego leczenia - z jak najdłuższym efektem. I właśnie tutaj GBT sprawia, że wszystko jest takie proste.

Używając preparatów wybarwiających podczas GBT mogę wskazać obszary w jamie ustnej, które wymagają uwagi. Wiem dokładnie co robić i mogę wyraźnie pokazać pacjentom, co należy usunąć lub leczyć.

Pokazanie pacjentowi obszarów próchnicy i skuteczności GBT motywuje go do lepszej pielęgnacji zębów i powrotu na wizyty kontrolne. Obie grupy pacjentów odnoszą korzyści z GBT.

CERTYFIKACJA:

Podjęliśmy decyzję o uzyskaniu certyfikatu GBT nie dlatego, że pomogłoby to w marketingu, ale dlatego, że naszym priorytetem jest zapewnienie dobrej obsługi i utrzymanie stałej jakości. W ramach procesu certyfikacji otrzymujemy informacje zwrotne i przeprowadzamy audyt usług, co pomaga nam uczyć się i stać się coraz lepszymi.

Doktor Kilian Hansen, stomatolog

KIEFERORTHOPÄDE⁺ ZAHNARZT

DR. LAMPE | DR. HANSEN | DR. C. STRAUB | DR. P. STRAUB



PRZECZYTAJ CAŁY
ARTYKUŁ

LAMPE, HANSEN & STRAUB - PRAKTYKA GRUPOWA, NIEMCY



WPŁYW GBT

PRZED GBT



PO WYBARWIENIU



6-MIESIĘCZNA WIZYTA RECALL PO GBT



GBT JEST ABSOLUTNĄ REWOLUCJĄ



Protokół GBT zdecydowanie zmienił naszą praktykę w pozytywny sposób. Sprawił, że nasza praca stała się bardzo wydajna, co jest dla nas najważniejsze. Poprawił się również poziom świadczonych przez nas usług. Widzę to w szczególności w skróceniu czasu zabiegu, podczas którego mamy znacznie więcej czasu na komunikację z pacjentem, która jest integralną częścią higieny jamy ustnej i jest również niezbędna do współpracy z pacjentem. Praca zgodnie z jasno określonymi krokami protokołu GBT odpowiada nam i zapewnia wszystkim jednolity standard opieki.



Mudr. Sabina Moravcova, All-Dente

E-BOOK 100 PRZYPADKÓW KLINICZNYCH GBT

Odkryj przełom w profilaktyce jamy ustnej dzięki eBookowi 100 przypadków klinicznych GBT. To nowe wydanie opiera się na sukcesie dwóch poprzednich wydań, oferując nowy zbiór przypadków klinicznych, które pokazują ciągły wpływ protokołu Guided Biofilm Therapy (GBT).



GOTOWA KONFIGURACJA GBT

© FA-876/PL rev.A wydanie 2024/07



E.M.S. ELECTRO MEDICAL SYSTEMS SA
Chemin de la Vuarpillière 31
CH-1260 Nyon

Tel +41 22 99 44 700
Fax +41 22 99 44 701
E-mail welcome@ems-ch.com

EMS 
MAKE ME SMILE.