



TREATMENT RECOMMENDATIONS

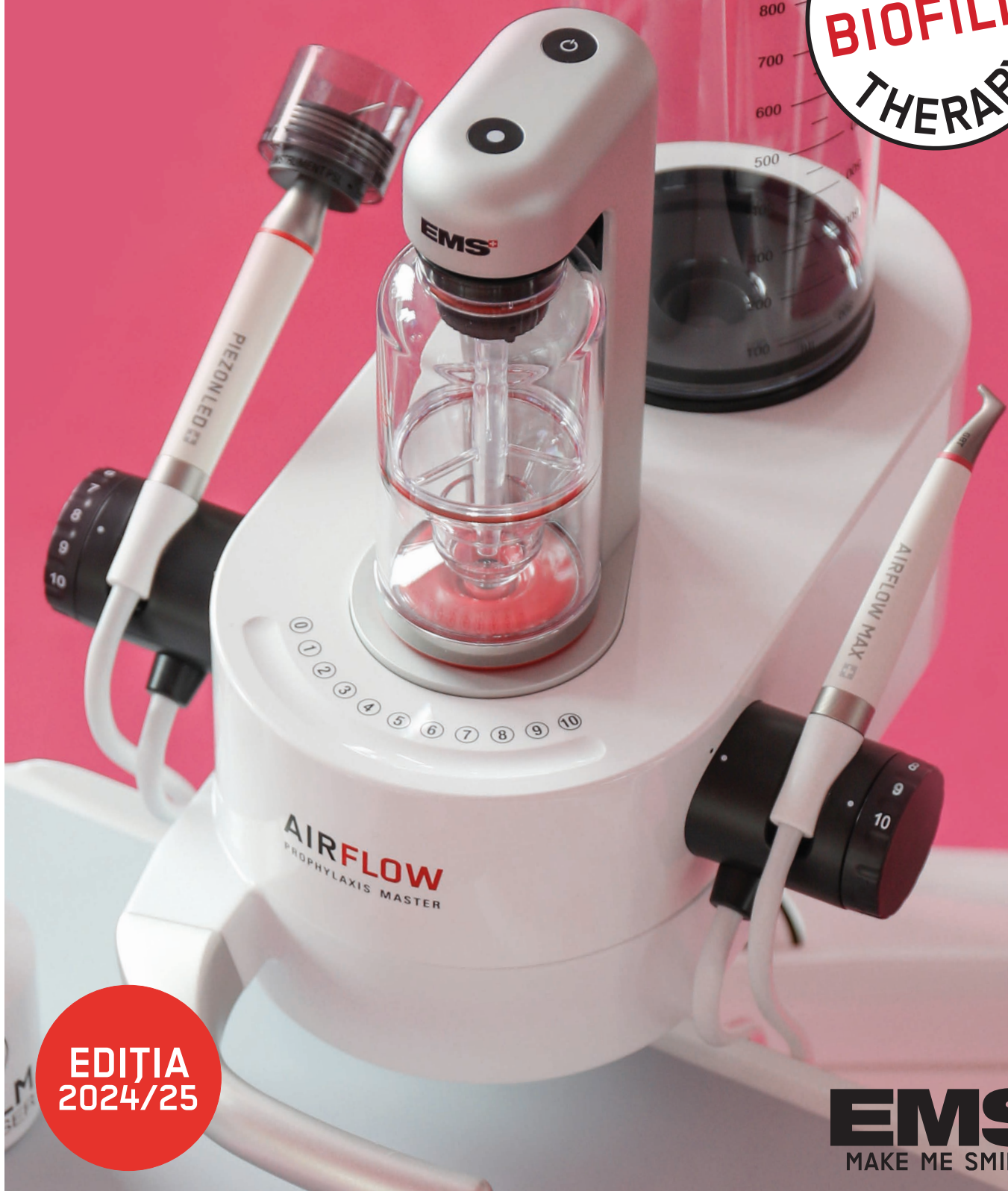

EDIȚIA
2024/25

EMS 
MAKE ME SMILE.

SINGURELE INSTRUMENTE

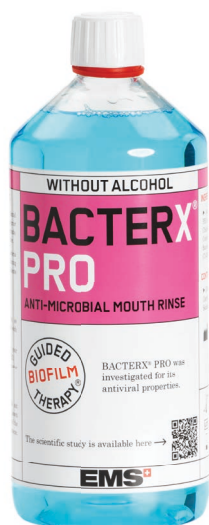

AFLAȚI
MAI MULTE
INFORMAȚII

SDA 
SWISS DENTAL ACADEMY



CERTIFIED PRACTICE



SCOPUL ACESTUI DOCUMENT

Acest document oferă recomandări pentru un tratament optim Guided Biofilm Therapy (GBT) și pentru a asigura cel mai înalt nivel de eficiență, siguranță și confort atât pentru pacienți, cât și pentru clinicieni în timpul gestionării plăcii bacteriene și tartrului, precum și la îndepărtarea petelor. În plus, indicațiile de tratament ajută clinicienii să își îmbunătățească ergonomia, oferind confort superior și un concept care să fie economic pentru proprietarul cabinetului*.

GBT este un protocol bazat pe dovezi, orientat pe indicații, sistematic și modular pentru prevenire, profilaxie, terapie și întreținere.

Swiss Dental Academy (SDA), ramura educațională a EMS, formează profesioniști din domeniul stomatologic, în GBT, pentru a oferi tratamente de ultimă generație, asigurând astfel o sănătate și o igienă orală optimă pentru pacienți.



* Așa cum este aprobat în IFU FB-618

GBT COMPAS ȘI PROTOCOLUL

08 RECALL

PACIENT SĂNĂTOS = PACIENT FERICIT

- Prog ramai următoarele edine (recall-uri) în funcție de evaluarea riscului
- Întreabă-l pe pacient dacă i-a plăcut tratamentul

07 CONTROL

FACEȚI PACIENTUL SĂ ZÂMBEASCĂ

- Efectuați o verificare finală pentru placa bacteriană rămasă - Asigurați-vă că tartrul este complet eliminat
- Diagnosticați cu precizie cariile
- Protejați cu fluor
- Nu mai este nevoie să lustruiți

06 PIEZON® PS


ÎNDEPĂRTAȚI TARTRUL RĂMAS

- Utilizați instrumentul minim invaziv EMS PIEZON® PS supra și subgingival până la 10 mm
- Curățați pungile parodontale >10 mm cu mini chiurete
- Utilizați instrumentul EMS PIEZON® PI MAX în jurul implantelor până la 3 mm subgingival și pe restaurări

05 PERIOFLOW®

ÎNDEPĂRTAȚI BIOFILMUL DIN BUZUNARELE > DE 4 PÂNĂ LA 9 MM

- Utilizați pudra AIRFLOW® PLUS pe dinii naturali în pungile parodontale adânci și furcile radiculare și pe implanturi
- Utilizați noul vârf, mai subțire PERIOFLOW®

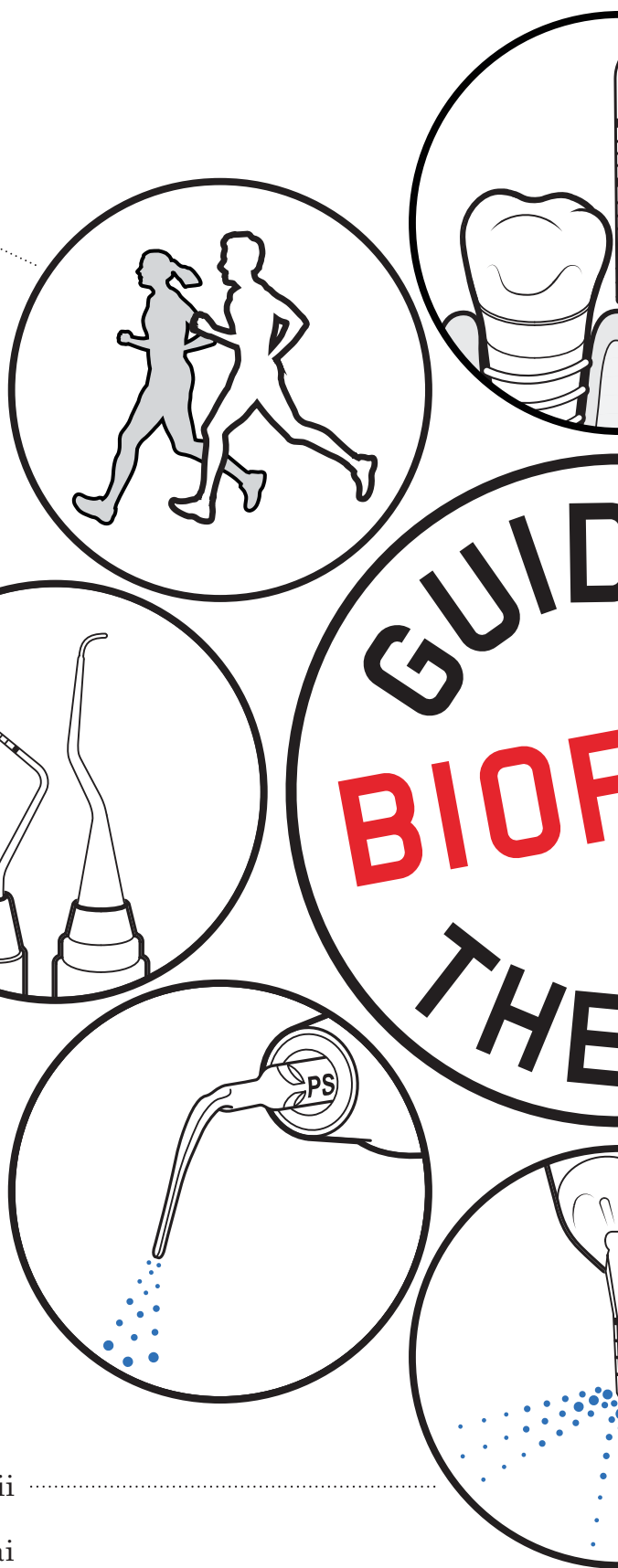

SĂU ÎN 8-PAȘI



01 EVALUAREA ȘI CONTROLUL INFECȚIEI

EVALUAȚI FIECARE CAZ CLINIC ȘI IMPLEMENTAȚI MĂSURI DE IGIENĂ

- Începeți prin clătirea cu apă de gură BacterX® Pro
- Examinați dinii, gingia și esuturile parodontale
- Examinați implanturile și esuturile peri-implant

02 EVIDENȚIAZĂ

FACEȚI BIOFILMUL VIZIBIL

- Arătați pacienților placa bacteriană evidențiată și zonele lor problematice cu ajutorul EMS Biofilm Discloser
- Colorarea vă va ghida în îndepărtarea plăcii bacteriene
- Odată ce placa bacteriană este îndepărtată, tartrul este mai ușor de detectat

03 MOTIVARE


CONȘTIENTIZARE ȘI ÎNVĂȚARE

- Subliniați rolul preveniei
- Instruiți-vă pacienții cu privire la igiena orală
- EMS recomandă periute interdentare sau ață dentară ca și periue electrice sau manuale și pastă AIRFLOW® pe bază de eritritol pentru îngrijirea zilnică de acasă

04 AIRFLOW® MAX

ÎNDEPĂRȚAȚI PLACA BACTERIANĂ, PETELE ȘI TARTRUL ÎNCIPIENT

- Utilizați AIRFLOW® MAX pe dinii naturali, restaurări și implanturi
- Îndepărtați placa bacteriană supra și subgingival până la 4 mm folosind pudra AIRFLOW® PLUS 14 μm
- De asemenea, îndepărtați placa bacteriană de pe gingie, limbă și palat

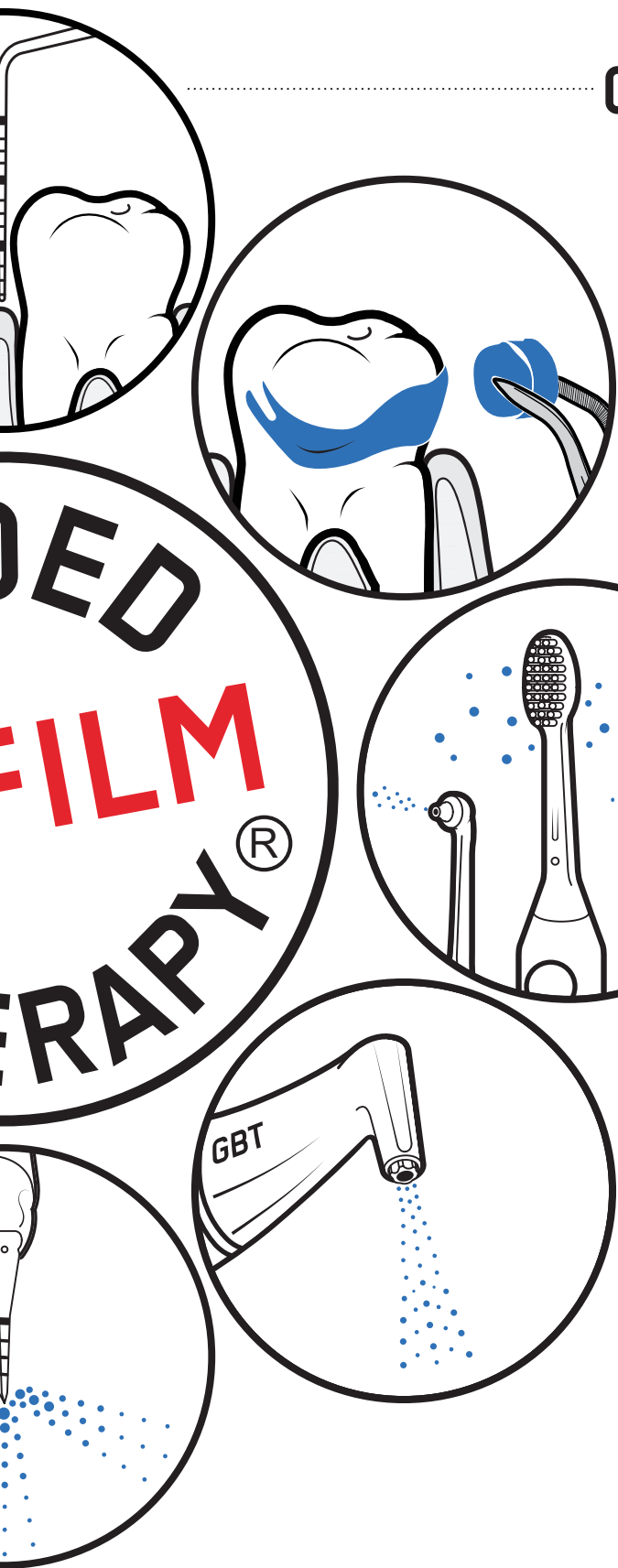

BENEFICIILE PRODUSELOR ORIGINALE EMS

PRECIZIE MARE

CALITATE DE NEEGALAT

EFICIENȚĂ CRESCUTĂ

CONFORT MAXIM AL PACIENTULUI
ȘI MAIS ,AS AL MEDICULUI

SIGUR

FĂRĂ RISCURI PENTRU SĂNĂTATE

RENTABIL

ERGONOMIC

DOVEDIT ȘTIINȚIFIC

O EXPERIENȚĂ „I FEEL GOOD”

Medicii pot găsi pe piață instrumente, piese de mână și pulberi false. Protejați-vă pacienții și cabinetul Dumneavoastră deoarece produsele stomatologice care imită originalele sunt asociate cu riscuri ridicate.

PREGĂTIREA



CLINICIAN

Protejați-vă cu mască (eficiență de filtrare bacteriană, BFE 96%), lupe dentare și mănuși.



MASCĂ



LUPE DENTARE



MĂNUȘI DE PROTECȚIE

CABINET

Umpleți camera de pudră AIRFLOW® PLUS a AIRFLOW® Prophylaxis Master, până la limita maximă indicată, cu pudră AIRFLOW® PLUS. Pregătiți EMS Biofilm Discloser, aspiratorul de salivă, VISIGATE, AIRFOAM, Pudră AIRFLOW® PLUS, vârful PERIOFLOW® dacă este necesar și **setul de instrumente sterile** care conține:

1. OGLINDĂ BUCALĂ
2. SONDĂ PARODONTALĂ
3. EXPLORATOR
4. PENSĂ
5. GBT FLOWCONTROL®
6. PIESĂ DE MÂNĂ AIRFLOW® MAX
7. PIESĂ DE MÂNĂ PIEZON®
8. INSTRUMENT PIEZON® PS/INSTRUMENT PI MAX

PACIENT

BACTERX® PRO, ochelari de protecție, bavetă pentru pacient.





01 EVALUAREA ȘI

ISTORICUL MEDICAL ȘI DENTAR AL PACIENTULUI


► Evaluarea este pasul inițial în protocolul Guided Biofilm Therapy (GBT), denumită în mod obișnuit anamneză, care implică o evaluare amănunțită. Aceasta include analiza riscului de carie și boală parodontală, precum și documentarea detaliată a istoricului stomatologic și medical al pacientului, acoperind inclusiv istoricul medicației și obiceiurile acestuia.

Este esențial să puneți pacienților întrebări specifice despre alergii și sensibilități la substanțe precum iodul, CPC/CHX și arome comune precum mentă, cireșe și lămâie. De asemenea, sunt importante și eritritolul și xilitolul. În plus, întrebați despre tratamentul cu anticoagulate pentru a asigura un plan de tratament sigur și personalizat.

Cereți pacientului să se clătească sau să facă gargară, în prealabil, timp de 40 de secunde cu apă de gură, de ex. BACTERX® PRO¹ pentru a minimiza riscul contaminării cu aerosoli.




Un screening și notarea amănunțită parodontală/peri-implantară sunt obligatorii pentru a planifica tratamentul: trebuie evaluate și notate în fișă - pungile parodontale în 6 puncte, sângerarea la sondare, culoarea, consistența conturului gingiilor.

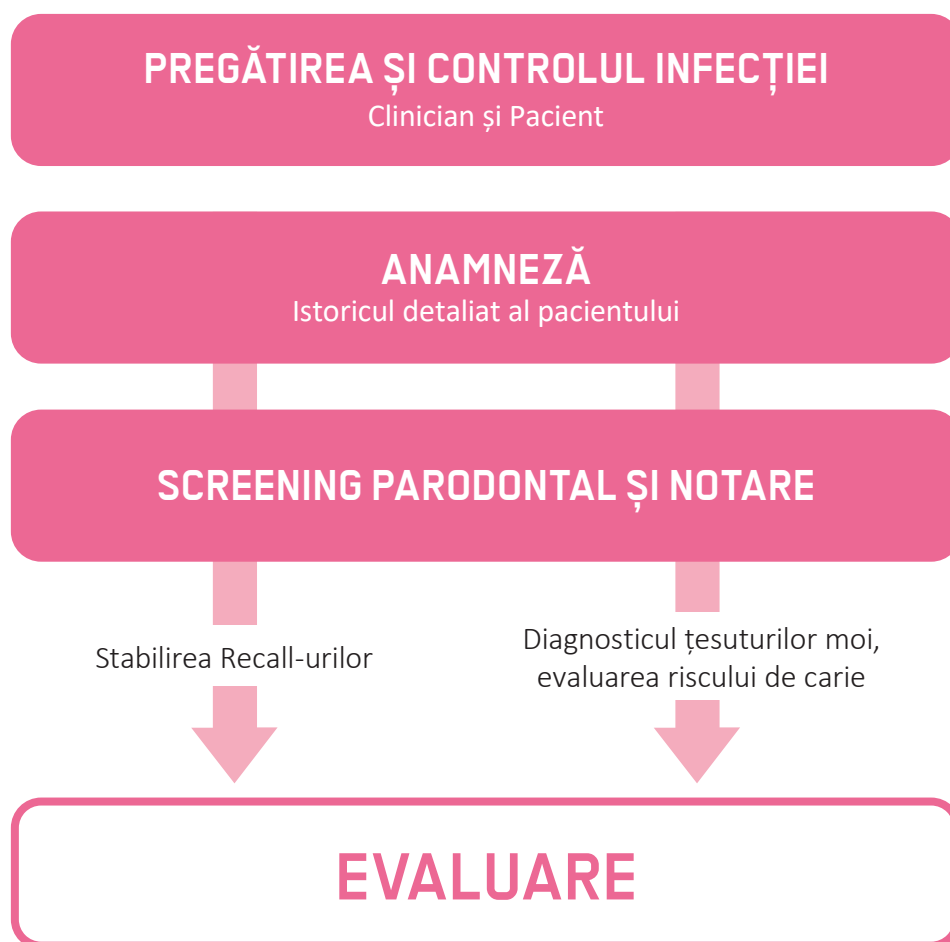


1. Inactivarea SARS-CoV-2 prin tratament cu apă de gură ViruProX® și BacterX® pro.
Julia Koch-Heier, Helen Hoffmann, Michael Schindler, Adrian Lussi, Oliver Planz
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33802603/>


EVALUAREA RISCULUI DE CARIE

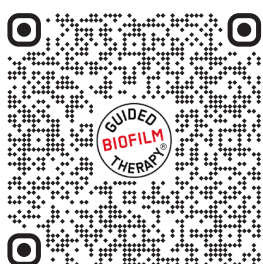

Pentru copii
0- 6 ani

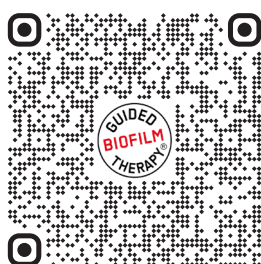

Pentru copii
≥ 6 ani

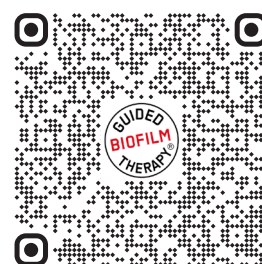

Pentru adulți

Scopul evaluării și verificării sănătății orale este de a facilita trecerea de la o abordare restaurativă la o abordare preventivă, pe termen lung, care este bazată pe risc și care răspunde nevoilor specifice ale fiecărui pacient. Informațiile culese în acest pas formează baza discuțiilor cu pacienții cu privire la sănătatea lor orală. De asemenea, ușurează discuția în timpul pasului de motivare.




SONDAȚI ȘI ANALIZAȚI

► Sondarea și screeningul reprezintă piatra de temelie pentru a discuta cu pacientul starea de sănătate orală pe termen lung.


Dacă nu se măsoară adâncimea, tratamentul nu poate fi început.

Evaluarea țesuturilor moi ne ghidează către următorul pas al protocolului GBT.

Mai jos este prezentată o imagine de ansamblu asupra instrumentelor care trebuie utilizate pentru diferite situații clinice.

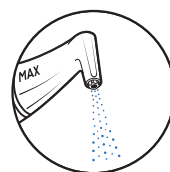

AIRFLOW® MAX
SUPRA ȘI SUBGINGI-
VAL PÂNĂ LA 4 MM

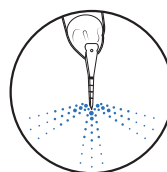


PERIOFLOW®
SUBGINGIVAL 4-9 MM



PIEZON® PS
SUPRA- ȘI
SUBGINGIVAL
PÂNĂ LA 10 MM

PE DINȚII NATURALI

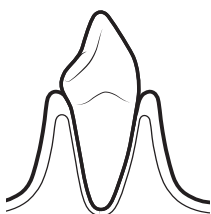


SĂNĂTOS

- GINGIE SĂNĂTOSĂ
- FĂRĂ SÂNGERARE LA SONDARE



NU ESTE
NECESAR

✓
DACĂ EXISTĂ
TARTRU

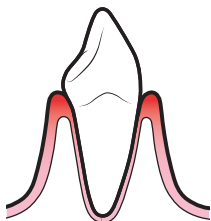

GINGIVITĂ


- PUNGĂ PARO MICĂ
- FĂRĂ PIERDERE OSOASĂ
- SÂNGERARE LA SONDARE



4 mm

NU ESTE
NECESAR

✓
DACĂ EXISTĂ
TARTRU

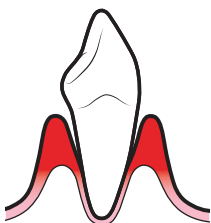

PARODONTITĂ

- PUNGĂ PARO ADÂNCĂ
- PIERDERE OSOASĂ
- SÂNGERARE LA SONDARE
- FĂRĂ SUPURAȚIE




4 mm



9 mm



10 mm

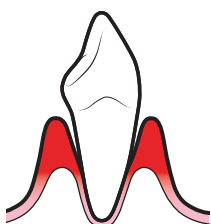

SUPURANT

- PARODONTITĂ
- PIERDERE OSOASĂ
- SÂNGERARE LA SONDARE DOAR SUPRA
- SUPURAȚIE



10 mm


FIECARE CAZ CLINIC



► Sondarea în jurul implanturilor ar trebui făcută la fiecare ședință. Putem folosi fie o sondă metalică, fie o sondă din plastic pentru a evalua adâncimile de sondare.



AIRFLOW® MAX
SUPRA ȘI
SUBGINGIVAL PÂNĂ
LA 4 MM


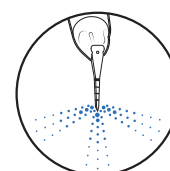


PERIOFLOW®
SUBGINGIVAL 4-9 MM



PIEZON® PI MAX
SUPRA- ȘI SUB-
GINGIVAL PÂNĂ LA
3 MM

PE IMPLANTURI

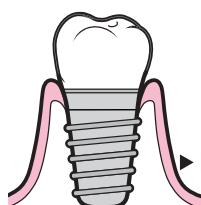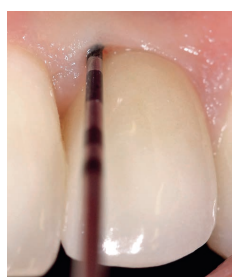

SĂNĂTOS

- FĂRĂ PIERDERE OSOSĂ
- GINGIE SĂNĂTOASĂ
- FĂRĂ SÂNGERARE LA SONDARE
- FĂRĂ SUPURAȚIE




4 mm



9 mm



DACĂ EXISTĂ
TARTRU

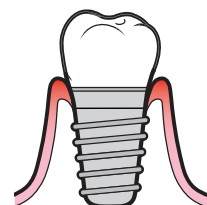

MUCOZITĂ

- FĂRĂ PIERDERE OSOSĂ
- SÂNGERARE LA SONDARE
- FĂRĂ SUPURAȚIE




4 mm



9 mm



DACĂ EXISTĂ
TARTRU

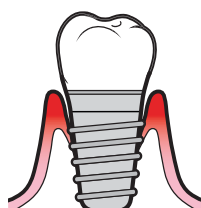

PERI-IMPLANTITĂ

- PIERDERE OSOASĂ
- SÂNGERARE LA SONDARE
- FĂRĂ SUPURAȚIE




4 mm



9 mm



DACĂ EXISTĂ
TARTRU

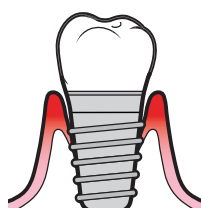

PERI-IMPLANTITĂ SUPURANTĂ

- PIERDERE OSOASĂ
- SÂNGERARE LA SONDARE
- SUPURAȚIE



DOAR SUPRA



DACĂ EXISTĂ
TARTRU



02 EVIDENȚIAȚI

- Evidențierea plăcii bacteriene este un pas important în Guided Biofilm Therapy (GBT) pentru a vedea placa bacteriană supragingivală, care nu este de obicei vizibilă cu ochiul liber.

EMS Biofilm Discloser este un colorant în două tonuri care conține următoarele ingrediente: apă (aqua), glicerină, etil paraben, aromă (aromă), clorură de N-cetilpiridiniu, eritrozină și albastru patentat.

SCOPUL

- Face vizibilă toată placa bacteriană supragingivală pentru a asigura un tratament minim invaziv și pentru o îndepărtare completă a acesteia.

AVANTAJE PENTRU PACIENT

- Motivare, reeducare privind igiena orală
- Înțelegerea necesității unei profilaxii profesionale
- Instruire și motivare personalizată a pacientului
- Autoevaluarea de către pacient
- Eficacitatea menținerii igienei orale

AVANTAJE PENTRU CLINICIAN

- Vizualizați placa bacteriană dentară
- Culoarea ghidează îndepărtarea plăcii bacteriene
- Stabiliți indicii de placă



RECOMANDĂRI DE UTILIZARE



1. Asigurați-vă că GBT VISIGATE® este aplicată corect.
2. Luați o peletă cu pensa și aplicați-o pe toate suprafețele dinților inclusiv vestibular, lingual, palatinal, ocluzal și interdental.
3. După evidențiere, îndepărtați excesul de culoare cu **AIRFLOW® MAX** la  putere 0 și  apă la 10.

► EMS Biofilm Discloser este sigur de utilizat pentru toate grupele de vârstă, precum și în toate aplicațiile clinice, de ex. în jurul dinților, implanturilor, restaurărilor, lucrărilor protetice și aparatelor ortodontice. Vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare pentru a exclude orice contraindicație.

Pentru a elimina excesul de colorant, utilizați:

1. PUTEREA LA 0
2. APA LA 10
3. GBT FLOWCONTROL®
4. AIRFLOW® MAX
5. GBT VISIGATE®





03 MOTIVAȚI

MOTIVAȚIA ESTE PIATRA DE TEMELIE ȘI FORMEAZĂ BAZA ÎNCREDERII ȘI A ACORDULUI PACIENȚILOR PENTRU A AJUNGE LA O SĂNĂTATE ORALĂ OPTIMĂ PE VIAȚĂ.

Sănătatea orală de succes, pe termen lung, nu se bazează doar pe curățarea profesională a dinților prin GBT ci, mai important, pe îngrijirea zilnică la domiciliu. Reeducați și instruiți pacienții cu privire la igiena orală. Subliniați importanța prevenției. Discutați despre orice obiceiuri precum fumatul, etc. În acest punct, poate fi necesară consilierea nutriției. Arătați pacienților zonele în care este necesară îmbunătățirea igienei orale, spuneți-le ce să facă și, de asemenea, lucrați cu ei la folosirea mijloacelor suplimentare interdentare, individualizate sau folosirea aței dentare, acolo unde este necesar.



ARĂTAȚI

Pacientului placa bacteriană evidențiată

INSTRUȚI

Pacientul Dumneavoastră în igiena orală

MOTIVAȚI

ÎNGRIJIRE LA DOMICILIU




PASTĂ DE DINȚI* AIRFLOW® # PE
BAZĂ DE ERITRITOL

PROPRIETĂȚI ANTICARIOGENE
CRESCUTE**

ABRAZIUNE SCĂZUTĂ PENTRU O
ÎNGRIJIRE ZILNICĂ BLÂNDĂ, DAR
EFICIENTĂ LA DOMICILIU

BIOCOMPATIBIL, FĂRĂ SLS¹ SAU
PARABENI

IDEAL PENTRU PACIENȚII SENSIBILI

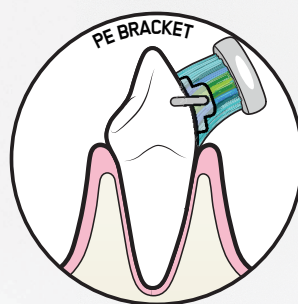

1. Barbara Cvikl și Adrian Lussi, Healthcare 1012, 9, 935 Barbara Cvikl și Adrian Lussi, The biocompatibility of a new erythritol-and xylitol-containing fluoridetoothpaste., Healthcare 2021, 9, 935.

* Dacă este disponibilă în țara Dumneavoastră

** Din Broșura GBT FA-612 rev.G


AIR-FLOWING®

- ▶ AIR-FLOWING® este sinergia AIRFLOW® Prophylaxis Master, piesele de mână AIRFLOW® respective, inclusiv AIRFLOW® MAX, AIRFLOW® precum și PERIOFLOW® și pudra AIRFLOW® PLUS pe bază de eritritol.
- ▶ Doar AIR-FLOWING® funcționează cu un debit constant și reglat al pudrei AIRFLOW® PLUS. Acest lucru face gestionarea plăcii bacteriene în timpul Guided Biofilm Therapy (GBT) mai predictibilă, sigură, eficientă și confortabilă.
- ▶ AIR-FLOWING® este o parte integrantă a protocolului de Guided Biofilm Therapy.

AIR-FLOWING®



APLICAȚII

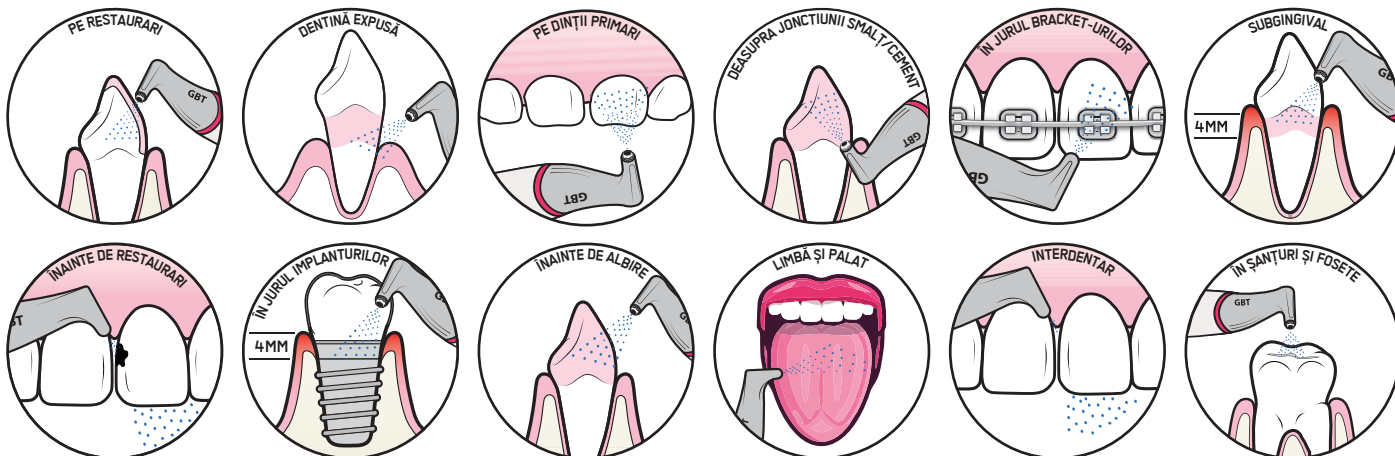

PUDRA AIRFLOW® PLUS

MINIM INVAZIV
MAXIM PREVENTIV
CONFORT OPTIM

„Sunt și
o sticlă de
apă!”



CONȚINE

Eritritol, CPC sau CHX, silice amorfă. Dimensiune: 14 μm

Pudra originală AIRFLOW® PLUS este disponibilă într-o sticlă de aluminiu (400 de grame) de înaltă calitate, pentru o rezistență mai mare. Când se golește, faceți-o cadou pacientului Dumneavoastră.

Pudra originală AIRFLOW® PLUS este disponibilă într-o sticlă de aluminiu (400 de grame) de înaltă calitate, pentru o rezistență mai mare. Are o deschidere complet reproiectată și 100% biodegradabilă pentru un flux precis și controlat de pudră, care asigură reumpleri rapide și ușoare ale camerei de pudră. Când se golește, faceți-o cadou pacientului Dumneavoastră.

DINȚI

- Dinți temporari și definitiv

ȚESUTURI DURE DENTARE

- Smalt
- Dentină
- Cement

ȚESUTURI MOI ORALE

- Pungi parodontale supra și subgingivale de până la 9mm
- Limbă
- Palat

IMPLANTE

- Sanțul peri-implantar
- Pungi peri-implantare adânci

RESTAURĂRI ȘI LUCRĂRI PROTETICE

- Restaurări
- Lucrări protetice
- Proteze dentare

ORTODONȚIE

- Brackets ortodontici
- Aligners
- Toate componentele aparatului ortodontic

ÎNDEPĂRTAȚI PLACA BACTERIANĂ ÎNAINTE DE

- Diagnosticul cariilor
- Tratament cu fluor
- Tratament ortodontic
- Tratament restaurator și protetic
- Proceduri de albire



04 AIRFLOW® MAX

AIRFLOW® - TEHNOLOGIA ORIGINALĂ EMS

SCOPAVANTAJE PENTRU PACIENT AVANTAJE PENTRU CLINICIAN

TOATE CAZURILE

Îndepărtarea petelor supragingivale și a plăcii bacteriene supra- și subgingivale de până la 4 mm

LIPSA CULORII, PLACA BACTERIANĂ ÎNDEPĂRTATĂ

PETE ȘI PLACĂ BACTERIANĂ ÎNDEPĂRTATE



RECOMANDĂRI DE UTILIZARE



UNGHI

- ▶ Intervalul de utilizare este între 15°-80°.
- ▶ Reglați continuu unghiul în timpul utilizării.
- ▶ Evitați utilizarea piesei de mână AIRFLOW® MAX la 90°.



DISTANȚĂ

- ▶ Regula generală pentru AIRFLOW® MAX: folosiți mai aproape!
- ▶ Păstrați piesa de mână la 2 până la 5 mm în timpul tratamentului.
- ▶ În caz de pete persistente, păstrați piesa de mână la maximum 2 mm.

MIȘCARE

- ▶ Faceți mișcări semi-circulare continue.
- ▶ Creați mici „smiley” dinspre mezial spre distal.
- ▶ Nu țineți niciodată piesa de mână pe loc!

SETĂRI DE PUTERE ȘI APĂ

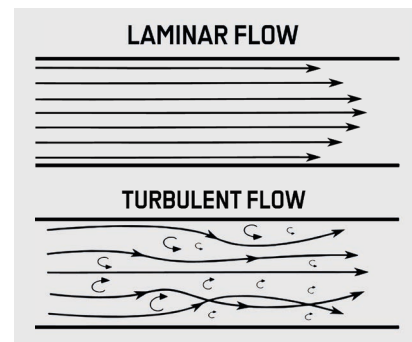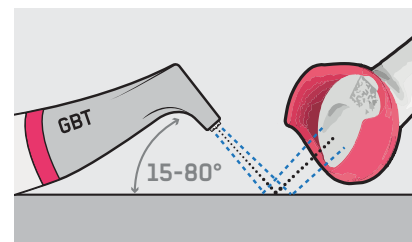


AIRFLOW® MAX cu tehnologia patentată Laminar AIRFLOW® pentru un control perfect.

SITUAȚII SPECIALE ÎN CARE CLINIȚIENII TREBUIE SĂ FOLOSEASCĂ PROPRIUL DISCERNĂMÂNT SAU SĂ AIBĂ ACORDUL MEDICULUI CURANT

- ▶ Terapia antiresorptivă care reduce pierderea osoasă (adică terapia cu bifosfonați sau denosumab).
- ▶ Paciente însărcinate sau care alăptează.
- ▶ Pacienți contagioși sau pacienți cu risc de infecție: posibilitatea aplicării tratamentului AIRFLOW® și/ sau PERIOFLOW® trebuie evaluată individual de către clinician în funcție de starea medicală prezentă și în conformitate cu nivelul de protecție al medicului, evaluarea riscului pacientului și reglementări specifice țării.
- ▶ Pacienții compromiși din punct de vedere medical (de exemplu diabet zaharat, interacțiuni cu medicamente multiple, anomalii cardiace, boli infecțioase...).
- ▶ Pacienții care iau medicamente (de exemplu anticoagulante).

CONTRAINDICAȚII

- ▶ La pacienții cu bronșită acută necontrolată/astm bronșic sau boală/infecție a căilor respiratorii superioare prezentă în ziua programării.

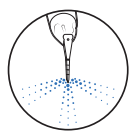

05 PERIOFLOW®

SCOP AVANTAJE PENTRU PACIENT AVANTAJE PENTRU CLINICIAN



ÎNDEPĂRTAȚI VÂRFUL ►


Utilizați instrumentul de verificare
PIEZON®.



RECOMANDĂRI DE UTILIZARE






- ▶ De preferință utilizați cu dispozitivele de masă.
- ▶ Folosiți NUMAI pudră AIRFLOW® PLUS sau PERIO.
- ▶ De unică folosință.
- ▶ Nu împingeți niciodată vârful în punga parodontală chiar dacă adâncimea de sondare este mai mare de 4 mm.
- ▶ Corelați adâncimea de sondare clinică cu radiografiile.
- ▶ Folosiți între 5-10 secunde în fiecare zonă, în funcție de adâncimea de sondare.
- ▶ Dacă tratați mai multe zone la un singur pacient, verificați dacă vârful nu este îndoit și calitatea nu s-a modificat. După 20 de zone, utilizați un vârf nou.
- ▶ Folosiți arătătorul și degetul mare pentru a comprima zona.
- ▶ Introduceți vârful până în adâncimea pungii parodontale.
- ▶ Activați AIRFLOW® PROPHYLAXIS MASTER sau AIRFLOW® One.
- ▶ Începeți cu mișcări repetitive verticale, suprapuse, pe măsură ce ieșiți din punga parodontală.
- ▶ Dinte natural: utilizare specifică zonei.
- ▶ Implant: minim 6 zone de tratat.

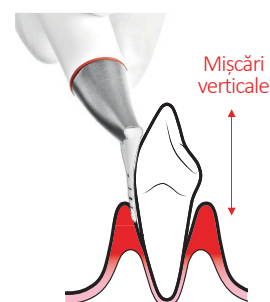

5 LA 10

10

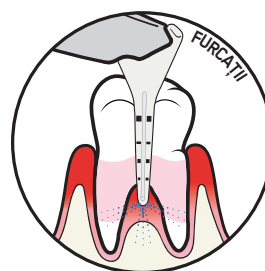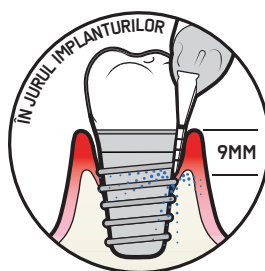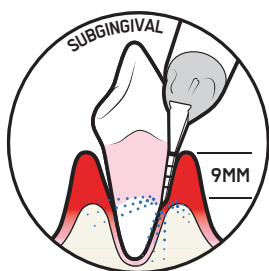

CONTRAINDICAȚII*

- ▶ După orice debridare subgingivală, mai ales când starea țesuturilor moi nu este optimă.
- ▶ Sângerare abundentă și supurație la sondare.
- ▶ Lipsă de țesut keratinizat.
- ▶ Adiacent unei zone nevindicate sau cu o extracție recentă.
- ▶ Acolo unde există prezența unui abces.
- ▶ Durere acută în zona respectivă.
- ▶ În caz de fractură verticală a rădăcinii.

RISC DE EMFIZEM

- ▶ Ce este emfizemul? Emfizemul subcutanat apare ca urmare a introducerii anormale sau a prezenței de aer sau gaz în țesuturi sau spații tisulare. A fost recunoscut și documentat ca o complicație pentru orice procedură orală care utilizează aer presurizat.

Citiți mai multe despre semnele clinice și ce trebuie făcut în caz de emfizem prin scanarea codului QR*.



* Așa cum este aprobat în IFU FB-618



TEHNOLOGIA PIEZON® NU PAIN TREBUIE UTILIZATĂ DUPĂ AIR-FLOW-WING® PENTRU A ÎNDEPĂRTA TARTRUL DUR ACUM VIZIBIL SUPRA ȘI SUBGINGIVAL.

SCOP


► Pentru a elimina tartrul supra- și subgingival într-un mod sigur, eficient, minim invaziv, predictibil și confortabil printr-o mișcare liniară și reglare dinamică a puterii.

AVANTAJE PENTRU PACIENT

- Este sigur și păstrează integritatea naturală a dinților, restaurărilor, protezelor, implanturilor și aparatelor ortodontice.
- Minim invaziv.
- Confortabil: fără sensibilitate sau durere în timpul sau după tratament.

AVANTAJE PENTRU CLINICIAN

- Design subțire pentru un acces optim.
- Senzație tactilă similară cu o sondă pentru a detecta tartrul în zonele subgingivale.
- Eliminarea eficientă și predictibilă a tartrului.
- Ergonomie optimă.

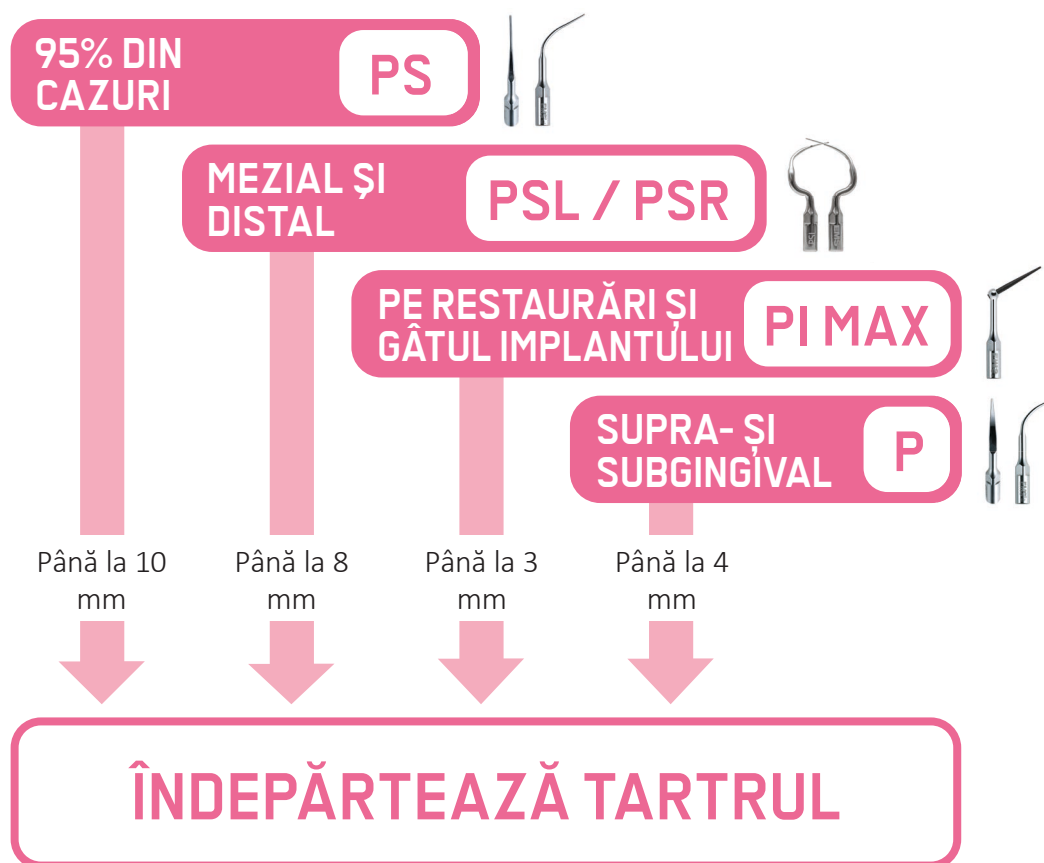

Pe dentina expusă: curățați din nou, ușor cu pudra PLUS dacă pacientul prezintă rugozitate

RECOMANDĂRI DE UTILIZARE



SETĂRI CORECTE

- Setați AIRFLOW® Prophylaxis Master în funcție de indicații și instrumentul folosit.

ADAPTARE

- Țineți instrumentul original PIEZON® PS paralel cu dintele.

ANGULARE


- Poziționați instrumentul ușor tangent (5° - 30°).
- Numai ultimii 1-2 mm ar trebui să fie în contact cu dintele.

PRESIUNE


- Lăsați instrumentul să funcționeze fără efort, fără presiune.

MIȘCARE


- Faceți mișcări mici înainte și înapoi după ce vă adaptați pentru a elimina tartrul.
- Nu folosiți niciodată vârful, fața sau spatele instrumentului.

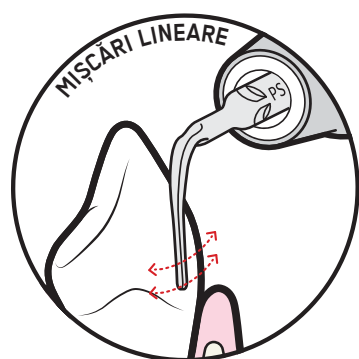

MĂRIRE 20x

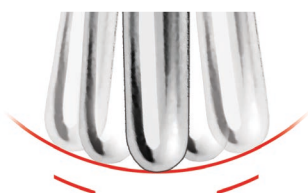

PRIMII 2MM AI INSTRUMENTULUI PS

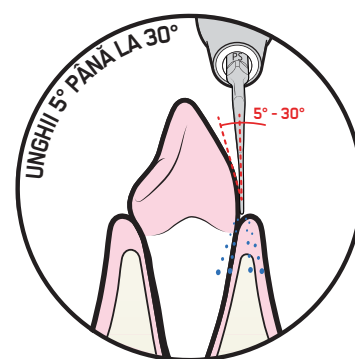

SITUAȚII SPECIALE ÎN CARE CLINIȚIENII TREBUIE SĂ FOLOSEASCĂ PROPRIUL DISCERNĂMÂNT SAU SĂ AIBĂ ACORDUL MEDICULUI CURANT*..

- Terapia antiresorptivă care reduce pierderea osoasă (adică terapia cu bifosfonați sau denosumab).
- Pacienți contagioși sau pacienți cu risc de infecție: posibilitatea aplicării tratamentului PIEZON® trebuie evaluată individual de către clinician în funcție de starea medicală prezentă și în conformitate cu nivelul de protecție al medicului, evaluarea riscului pacientului și reglementările specifice țării.
- Pacienți compromiși din punct de vedere medical (de exemplu diabet zaharat, interacțiuni medicamentoase multiple, anomalii cardiace, boli infecțioase...).
- Pacienții care iau medicamente (de exemplu anticoagulante).

* Așa cum este aprobat în IFU FB-618



06 PIEZON®


INSTRUMENT PIEZON® PS

Îndepărtează tartrul supragingival și subgingival de până la 10 mm:

- De la dinții temporari și definitiv.
- Din țesuturile dure dentare: smalț, dentină și cement.
- Întotdeauna începeți cu putere mică și creșteți când este necesar.
- Folosiți un debit de apă mediu spre mare.

 1 PÂNĂ LA 10 SUPRAGINGIVAL
1 LA 6 SUBGINGIVAL

 7 LA 10

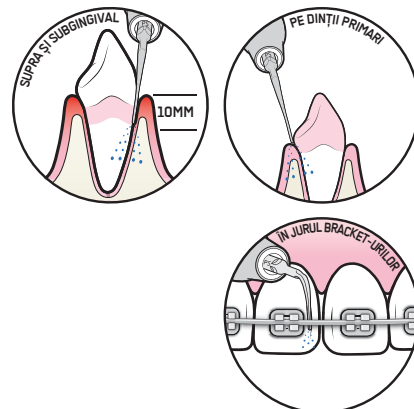


INSTRUMENT PIEZON® PSL/PSR

Îndepărtează tartrul supragingival și subgingival din spațiile interproximale de până la 8 mm:

- La dinții definitiv.
- Din țesuturile dure dentare: smalț, dentină și cement.
- Întotdeauna începeți cu putere mică și creșteți când este necesar.
- Folosiți un debit de apă mediu spre mare.

 1 LA 6

 7 LA 10

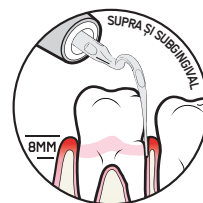


INSTRUMENT PIEZON® P

Îndepărtează tartrul supragingival și subgingival de până la 4 mm:

- La dinții definitiv.
- Din țesuturile dure dentare: smalț, dentină și cement
- Folosiți o setare de putere mică spre medie.
- În cazul tartrului dur, folosiți o putere mai mare.
- Folosiți un debit de apă mediu spre mare.

 3 LA 6

 7 LA 10

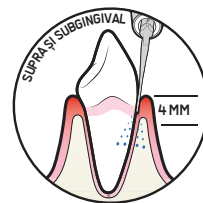


INSTRUMENT PIEZON® PI MAX

Îndepărtează tartrul supragingival și subgingival de până la 3 mm:

- La restaurări, lucrări protetice și proteze dentare
- În jurul implanturilor.
- În jurul aparatelor ortodontice.
- Folosiți o setare de putere mică spre medie.
- Folosiți un debit de apă mediu spre mare.

 3 LA 5

 7 LA 10

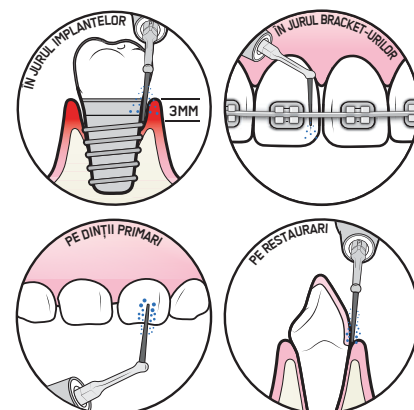

INSTRUMENT DE VERIFICARE




- Verificați întotdeauna uzura instrumentului PIEZON® PS NO PAIN pentru a asigura confort maxim pentru pacienții Dumneavoastră în timpul tratamentului.
- Trebuie să schimbați instrumentul PIEZON® PS dacă acesta este uzat de la vârf 2mm*.
- Folosind un instrument care este uzat, veți deteriora sonotrodul piesei de mână și, prin urmare, va trebui să cumpărați o nouă piesă de mână.

CÂND ESTE UZAT!



NOU

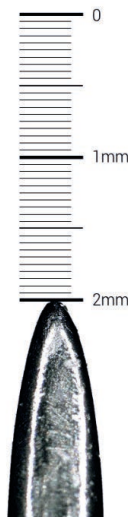


ÎNLOCUȚI!

- Instrumentele trebuie înlocuite pentru o eficacitate optimă.
- Predictibilitatea se modifică după 2 mm.
- Eficiența și confortul pacientului pot fi afectate.
- Sonotrodul piesei de mână poate fi și el deteriorat atunci când folosiți un instrument uzat.



**AFLAȚI MAI MULTE DESPRE
INSTRUMENTUL DE
VERIFICARE PIEZON®**

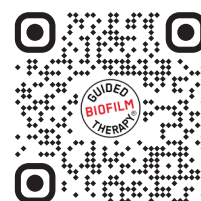

* Așa cum este aprobat în FA-794



07 VERIFICAȚI

VERIFICARE FINALĂ

- Verificați dacă există placă bacteriană, pete și tartru rămase.
- În plus, verificați mobilitatea aparatelor ortodontice, protezelor, marginilor restaurărilor.
- Lipsa plăcii bacteriene, petelor și tartrului în zonele supragingivale le permite clinicienilor să stabilească eficient un diagnostic al țesuturilor dure, inclusiv prezența cariilor, eroziunilor, furcațiilor și leziunilor sub formă de pete albe etc.

EXCEPȚIE:

- În urma utilizării PIEZON® la pacienții cu recesiune gingivală, refolosiți AIRFLOW® PLUS pentru a asigura îndepărtarea completă a plăcii bacteriene dacă este necesar.





AIRFOAM*

Utilizați AIRFOAM după tratamentul GBT sau după toate tratamentele dentare pentru a oferi pacientului o senzație de prospețime a gurii. În plus, AIRFOAM protejează suprafața dintelui până când următorul strat de peliculă salivară se formează**.

Conține 1.450 ppm de fluor. Disponibil într-o singură aromă - Berry

CONȚINE

Clorură de cetilpiridiniu (CPC) = 0,05%

Fluorură de sodiu = 0,32% cu fluorură = 0,145% (1450 ppm)

UTILIZARE

Nu este potrivit pentru copiii cu vârsta sub 7 ani. Apăsați o dată pentru a distribui cantitatea potrivită de AIRFOAM pentru o singură utilizare, aproximativ de dimensiunea unei alune.

1. Scoateți capacul de protecție.
2. Agitați recipientul pentru aprox. 6 secunde înainte de fiecare utilizare.
3. Țineți recipientul cu susul în jos în timpul aplicării.
4. Apăsați încet și cu grijă.
5. Ștergeți ușor spuma de pe dinții din față, ai pacientului Dumneavoastră, folosind degetele.
6. Lăsați pacientul să distribuie el însuși spuma în gură cu ajutorul limbii.
7. Lăsați să acționeze în gură cca. 1 minut inclusiv în toate spațiile interdentare, apoi rugați pacientul să scuie. Gata!

AIRFOAM elimină nevoia folosirii cupelor de cauciuc și a pastelor de lustruit.



* Dacă este disponibil în țara Dumneavoastră | ** De la FA-858



08 RECALL

► Frecvența recall-urilor (ședințelor următoare) se bazează pe evaluarea riscului individual al pacientului, riscul cariilor, istoricul bolilor parodontale, prezența oricăror aparate, igiena orală, obiceiurile pacientului și nivelul de motivație.

Experiența pacientului joacă, de asemenea, un rol important pentru recall.

ÎNTREBAȚI-L PE PACIENT

Dacă i-a plăcut tratamentul




PROGRAMAȚI URMĂTORUL RECALL

Conform evaluării riscului

I FEEL GOOD



PROGRAMUL DE RECALL RECOMANDAT

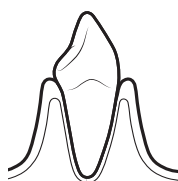


SĂNĂTOS

- ▶ GINGIE SĂNĂTOSĂ
- ▶ FĂRĂ SÂNGERARE LA SONDAREA
- ▶ FĂRĂ CARII

RECALL


6 - 12 LUNI

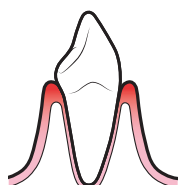

GINGIVITĂ

- ▶ PUNGĂ PARO MICĂ
- ▶ FĂRĂ PIERDERI OSOASE
- ▶ SÂNGERARE LA SONDARE


6 LUNI

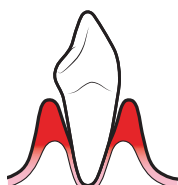

PARODONTITĂ

- ▶ PUNGĂ PARO ADÂNCĂ
- ▶ PIERDERE OSOASĂ
- ▶ SÂNGERARE LA SONDARE
- ▶ FĂRĂ SUPURAȚIE



1 - 3 LUNI

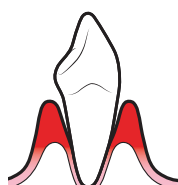

SUPURANT

- ▶ PARODONTITĂ
- ▶ PIERDERE OSOASĂ
- ▶ SÂNGERARE LA SONDARE
- ▶ SUPURAȚIE



1 - 3 LUNI

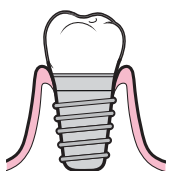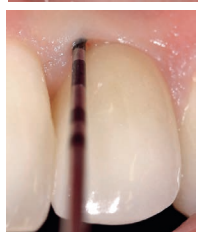

SĂNĂTOS

- ▶ FĂRĂ PIERDERE OSOSĂ
- ▶ GINGIE SĂNĂTOASĂ
- ▶ FĂRĂ SÂNGERARE LA SONDARE
- ▶ FĂRĂ SUPURAȚIE



6 LUNI

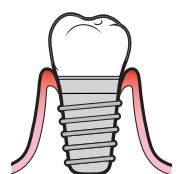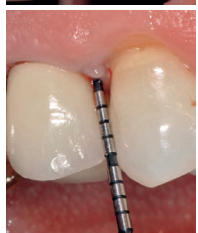

MUCOZITĂ

- ▶ FĂRĂ PIERDERE OSOSĂ
- ▶ SÂNGERARE LA SONDARE
- ▶ FĂRĂ SUPURAȚIE


3 - 6 LUNI

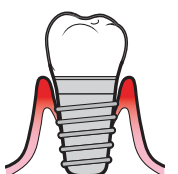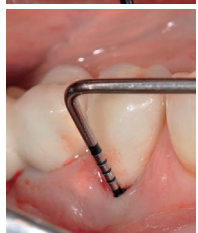

PERI-IMPLANTITĂ

- ▶ PIERDERE OSOSĂ
- ▶ SÂNGERARE LA SONDARE
- ▶ FĂRĂ SUPURAȚIE

1 LUNĂ

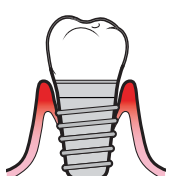

PERI-IMPLANTITĂ SUPURANTĂ

- ▶ PIERDERE OSOSĂ
- ▶ SÂNGERARE LA SONDARE
- ▶ SUPURAȚIE

1 LUNĂ


SWISS DENTAL ACADEMY

Bucurați-vă de o educație de înaltă calitate de oriunde, în orice moment. Învățare accesibilă și convenabilă

Dovezi clinice



Știați?

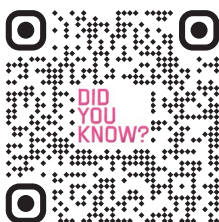

Podcast



Micro Learning



Webinarii



Întrebați expertul



Pagină de suport



PERFEȚIUNE PRIN ANTRENAMENT

Bine ați venit la Swiss Dental Academy (Academia Stomatologică Elvețiană - SDA) – calea Dumneavoastră către viitorul îngrijirii dentare! La SDA, nu suntem doar despre educația stomatologică; ci, o revoluționăm cu Guided Biofilm Therapy (GBT). Aici veți învăța tehnici inovatoare, focusate pe pacient, care vă diferențiază în lumea profilaxiei dentare și a tratamentului parodontal nechirurgical.

Experimentați diferența elvețiană! SDA combină precizia și inovația elvețiană pentru a oferi instruire de clasă mondială. Suntem mai mult decât un centru de învățare; suntem o mișcare globală, care remodelează îngrijirea dentară cu prevenire proactivă și strategii focusate pe pacient.

Cursurile noastre, concepute de experți stomatologici de top și predate de formatori renumiți, sunt mai mult decât simple lecții - sunt pietrele de temelie pentru ca Dumneavoastră să deveniți un lider în îngrijirea dentară. Cu SDA, dobândeți abilități, inspirați schimbarea și vă angajați la cele mai înalte standarde de îngrijire a pacienților.

Faceți progrese în domeniul Dumneavoastră cu SDA. Curriculumul nostru în continuă evoluție, selecția de cursuri care se extinde și cea mai recentă tehnologie, vă asigură că sunteți în topul practicii stomatologice.

Alăturați-vă SDA astăzi – conduceți schimbarea în sănătatea dentară, fiți la granița excelenței dentare și faceți parte dintr-o comunitate globală care stabilește noi standarde în îngrijirea dentară.

Călătoria Dumneavoastră spre excelență începe aici!



SDA 
SWISS DENTAL ACADEMY

**ÎNVĂȚAȚI CU
ACADEMIA
STOMATOLOGICĂ
ELVEȚIANĂ**





E.M.S. Electro Medical Systems S.A.
Ch. de la Vuarpillière 31
1260 Nyon - Elveția
+41 22 994 47 00
sdaglobalteam@ems-ch.com
ems-dental.com

SDA 
SWISS DENTAL ACADEMY

EMS 
MAKE ME SMILE.